

DRY & STORE®

Upute za Korištenje

VAŽNE MJERE OPREZA

Uređaj Dry & Store Global II namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Pri uporabi električnih proizvoda, osobito tamo gdje ima djece, mora se slijediti osnovnih sigurnosnih mjera opreza, koje obuhvaćaju sljedeće:

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

OPASNOST – da biste umanjili rizik od električnog udara:

- Ne koristite tijekom kupanja.
- Ne postavljajte i ne skladištite proizvod na mjesto s kojega može pasti ili ga se povući u kadu ili umivaonik.
- Ne postavljajte ga i ne ispuštite ga u vodu niti u druge tekućine.
- Ne posegnite za proizvodom ako upadne u vodu. Odmah ga odvojite od napajanja.

UPOZORENJE – da biste umanjili rizik od opekline, električnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda:

- Pozorno nadzirite uporabu od strane ili u blizini djece i invalidnih osoba.
- Proizvod koristite samo u namijenjenu svrhu kako je opisano u ovom priručniku.
- Proizvod nikada ne koristite ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi pravilno ili je ispušten ili oštećen ili je upao u vodu. Odnosite ga na mjesto kupnje ili u servisni centar na provjeru i popravak.
- Proizvod nikada ne stavljajte na meku plohu, kao što je kauč ili krevet. Pazite da u otvore za zrak ne dospiju trunčice, dlake i slično.
- Ne koristite vani niti na mjestima na kojima se koriste aerosolni proizvodi (raspršivači) ili gdje se daje kisik
- Adapter izmjenične struje koji je priložen uz uređaj namijenjen je naročito za ovaj uređaj. Ne koristite ga za druge uređaje i umjesto njega ne koristite adapter niti jednog drugog električnog uređaja.
- Neki uređaji Dry & Store koriste germicidnu ultraljubičastu svjetlost (UV) za sanitizaciju. Ta svjetlost vjerojatno neće svijetliti kad je poklopac otvoren. Nemojte mijenjati ili zaobilaziti bilo koju komponentu koja može dovesti do izlaganja UV svjetlu.*
- Ako se svjetiljka zatvori*, odmah ju isključite. Prilikom uklanjanja staklenih čestica potrebno je nositi rukavice. Odložite na pravilan način.

NAPOMENA – Ovaj proizvod nije namijenjen za dijagnostičke svrhe, prevenciju, praćenje, liječenje ili olakšavanje bolesti.

Uvjeti Rada Uređaja

Raspon radne temperature ovog uređaja je od 35 °C do 40 °C (95 °F do 104 °F). Ovaj uređaj će raditi ispravno na sobnim temperaturama od 18 °C do 30 °C (65 °F do 86 °F).

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Uvod

Ovaj je proizvod osmišljen za sve tipove slušnih instrumenata, uključujući slušna pomagala, kreatore buke, mušne monitore i opremu implantata. Ako se koristi po danu, može poboljšati rad slušnih uređaja, njihov dulji radni vijek te visoko pouzdani rad, a u uvjetima velike vlage radni vijek cinkove baterije može se produljiti. S ekskluzivnom tehnologijom Dry-Max™, Dry & Store uklanja štetnu akumulaciju vlage, suši ušni vosak te sanitizira površine izložene njegovoj germicidnoj lampi (kad je to primjenjivo).

Prije prve uporabe (Važno)

Desikant za upijanje vlage DryBrik® mora se pravilno aktivirati a električni kabel mora biti priključen prije prve upotrebe.

1. **Aktivirajte desikant:** Dry-Brik® za jednokratnu uporabu, koji se mora mijenjati na svaka dva mjeseca, naći ćete u kutiji s dodatnom opremom. Sredstvo za sušenje Dry-Brik obavlja tri važne funkcije: (1) trajno uklanjanje molekula vlage koje se otpuštaju iz uređaja tijekom ciklusa sušenja, (2) snižavanje relativne vlage unutar kutije na mnogo nižu razinu od one moguće samo s grijačem, povećavajući tako maksimalno kapacitet sušenja; (3) neutralizacija mirisa.

Za aktivaciju sredstva za sušenje Dry-Brik - uklonite poklopac od folije – (Slika 1). Ne uklanjajte foliju dok niste spremni za uporabu jer kad se jednom ukloni sredstvo za sušenje Dry-Brik počinje apsorbirati vlagu.



2. **Zabilježite datum aktivacije:** Na svako sredstvo za sušenje Dry-Brik pričvršćena je kartica koja vas upozorava kada morate zamijeniti sredstvo. Na ovu karticu upišite datum stavljanja za sušenje Dry-Brik u rad. (Slika 2).



NAPOMENA: Za osiguravanje maksimalnog performansa, promijenite sredstvo za sušenje Dry-Brik svaka 2 mjeseca.



3. **Smjestite aktivirano sredstvo za sušenje Dry-Brik u uređaj** kako je to prikazano na slici 3.



4. **Spojite AC adapter:** mali kružni priključak pristaje u stražnji dio uređaja (slika 4). Nemojte gurati na silu, treba lagano kliznuti unutra. Konačno, ukopčajte adapter u aktivnu električnu utičnicu.

* Neki modeli ne sadrže germicidnu lampu. Ako se to odnosi na vaš uređaj, zanemarite bilo koju uputu ili komentar koji se odnosi na "germicidni", "plavo svjetlo", "ultraljubičasto", "UV" ili "lampa".

Upute za uporabu

1. Obrišite suvišnu vlagu i ušni vosak sa slušnih pomagala prije nego ih postavite u komoru za sušenje. Otvorite poklopac i stavite vaše slušne instrumente ili opremu implantata u veliki pretinac s desne strane. Baterije ne morate vaditi, ali otvorite poklopac odjeljka za baterije kako biste omogućili cirkulaciju zraka.

2. Zatvorite poklopac i blago pritisnite tipku start koja se nalazi na prednjoj strani uređaja (slika 5). Zelena rukavica, vidljiva iza tipke start, aktivna je tijekom cijelog ciklusa što iznosi otprilike 8 sati. Najbolji se rezultati postižu u potpunom osmosatnom ciklusu ali kratka razdoblja od 30 minuta također imaju povoljan učinak. Sve radnje prestaju kada se poklopac otvori što resetira uređaj za mjerenje vremena.



Ako vaš uređaj ima ultraljubičastu lampu za sanitizaciju, plava svjetlost biti će vidljiva, na vrhu uređaja tijekom minute i pol nakon pokretanja uređaja, ukazujući na to da je u tijeku ciklus sanitizacije.

3. Važno je da se sredstvo za sušenje Dry-Brik zamijeni svaka dva mjeseca od datuma aktivacije kako bi se osigurala najviša razina skrbi za vaš slušni aparat. Bacite istrošeno sredstvo za sušenje Dry-Brik u kućni otpad.

Nešto o UV krugu za sanitizaciju*

Slušne proteze i slušna pomagala nakupljaju klice i bakterije. Neki modeli uključuju germicidnu UV lampu koja ubija takve organizme, a mnogi će korisnici osjetiti smanjen svrbež i iritaciju kao rezultat toga. Učinak sanitizacije najjači je u blizini lampe te se smanjuje s udaljenošću. No, ovaj uređaj nije sterilizator te proizvođač ne objavljuje nikakve tvrdnje u vezi broja uništenih bakterija. Uređaj nije osmišljen za dijagnosticiranje, prevenciju, nadzor, liječenje ili olakšavanje bolesti. UV lampa može se ukloniti bez utjecaja na kapacitet sušenja jer nije dio ciklusa zagrijavanja.

Uporaba s implantatima – Oprema

Hardver implantata treba čuvati suhim kako bi ispravno radio, a redovna primjena ovog uređaja može eliminirati vlagu koja se nakuplja iz okoline i/ili od znojenja. Neki korisnici mogu primijetiti poboljšanje u radnom vijeku baterije cink-zrak, posebice u vrućem i vlažnom vremenu. Pojedinačni rezultati variraju. Evo nekih posebnih prijedloga:

- **Procesori govora koji se nose iza uha:** Ostavite zink-zračne baterije u procesoru (gdje je primjenjivo), ali odvojite poklopac odjeljka za baterije. Postavite procesor, glavu i kabel u odjeljak za sušenje s desne strane. Na lijevi strani ladice nemojte stavljati ništa osim desikanta.
- **Govorni procesori koji se nose na tijelu:** Smjestite što je više moguće komponenti u odjeljak za sušenje bez natrpavanja, tako da imaju dovoljno prostora kako bi protok zraka bio neometan. Ograničenja u veličini mogu značiti da će se procesor morati održavati zasebno od hardvera. U tom slučaju, sklop mikrofona treba održavati češće od procesora jer je više podložan oštećenju uzrokovanom vlagom. Možda će biti potrebno ukloniti pakovanje baterija iz nekih procesora, ako je kombinirana veličina prevelika za odjeljak za sušenje.

Opće staranje za proizvod

Za najbolje rezultate, nemojte dopustiti rad uređaja na mjestima s visokom vlagom kao što je kupaonica. Držite poklopac zatvorenim cijelo vrijeme jer će se djelotvornost sredstva za sušenje smanjiti zbog apsorpcije vlage iz okolnog zraka. Uređaj čistite mekanom krpom. Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili abrazive. Nemojte štrcati tekućinu u posudu ili na UV lampu.

Rješavanje problema

- *Nijedno svjetlo ne svijetli nakon pritiska na tipku start:* Je li poklopac čvrsto zatvoren, a tipka start gurnuta? Ako da, provjerite je li AC adapter sigurno spojen i na uređaj i na utičnicu/mrežu te da li je utičnica/mreža pod nadzorom zidne sklopke koja je isključena. Zatim, pokušajte s drugim adapterom izmjenične struje (možete ga kupiti na mjestu kupnje proizvoda, u servisnom centru ili na www.dryandstore.com). Adapter zamijenite samo adapterom istog proizvođača. Ako se uređaj neće pokrenuti, možda postoji kvar na internoj elektronici pa je ga je potrebno vratiti u trgovinu u kojoj je kupljen ili u servisni centar na procjenu.
- *Uređaj bučno radi:* Problemi s bukom su obično vezani uz ventilator. Zvuk rezonira unutar uređaja tako da se može očekivati određena buka, čak i od visoko kvalitetnih ventilatora s kugličnim ležajevima koji se upotrebljavaju u ovom proizvodu. Ako buka ventilatora varira u intenzitetu ili frekvenciji, odvojite uređaj od napajanja i provjerite da nema zapreka. Ako nema, odnesite uređaj na servis.
- *Uređaj ne radi ispravno:* Da li se sredstvo za sušenje Dry-Brik mijenjalo redovito? Važno je da ga se mijenja svaka dva mjeseca sukladno uputama. Provjerite kretanje ventilatora. Ako se ne čuje zvuk ventilatora, vratite uređaj osoblju na mjestu kupnje ili servisnom centru radi procjene.

Za jedinice koje uključuju UV lampe:

- *Plava svjetlost nije vidljiva tijekom prve minute i pol radnog ciklusa, ali je uključeno zeleno svjetlo:* Provjerite da je UV lampa čvrsto uglavljena u utičnicu. Ako nije, izvadite je i opet je vratite na svoje mjesto, pokrenite opet jedinicu sa čvrsto zatvorenim poklopcem. Ako plavo svjetlo ne svijetli u prvih 1½ minute, zamijenite UV lampu (dostupna je u trgovini gdje ste kupili jedinicu, u servisnom centru ili na www.dryandstore.com). Adapter zamijenite samo posebnim adapterom koji ste dobili od proizvođača. Ako ne svijetle ni plavo ni zeleno svjetlo, pogledajte gore “Ne svijetli ni jedno svjetlo...” .
- *Metalna kuglica unutar UV lampe:* ovisno o proizvođaču lampe, neke lampe imaju metalnu kuglicu unutar cijevi i to je posve normalno. To je rezultat proizvodnog procesa koji je prilagođen zaštiti ljudskog okoliša kojim se umanjuju onečišćenja u zraku.

Ako ništa od navedenog ne riješi problem:

U sjevernoj americi zovite službu za korisnike na 1-888-327-1299 ili posjetite www.dryandstore.com

Izvan sjeverne Amerike kontakt Outside North America, obratite se prodajnom mjestu ili servisni centar za evaluaciju.

* Neki modeli ne sadrže germicidnu lampu. Ako se to odnosi na vaš uređaj, zanemarite bilo koju uputu ili komentar koji se odnosi na “germicidni”, “plavo svjetlo”, “ultraljubičasto”, “UV” ili “lampa”.