

DRY & STORE®

Instructions de Fonctionnement INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit est uniquement à usage domestique. Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, des consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies, et notamment:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER – Pour réduire le risque d'électrocution:

- Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez un bain.
- Ne placez pas ou ne rangez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne placez pas ou ne le faites pas tomber dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Si cet appareil est tombé dans l'eau, n'essayez pas de le retirer. Débranchez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, électrocution, incendie ou blessures corporelles:

- Faites très attention lors de l'utilisation par ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utilisez uniquement ce produit pour son utilisation prévue décrite dans ce manuel.
- N'utilisez jamais ce produit s'il présente un cordon ou une prise endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé et ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez-le là où vous l'avez acheté ou au centre de service pour qu'il puisse être examiné et réparé.
- Ne placez jamais le produit sur une surface molle telle qu'un lit. Assurez-vous que les ouvertures ne sont pas bouchées par des fibres, des cheveux ou tout autre débris identique.
- Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou le ne faites pas fonctionner lorsque des produits aérosols (bombes aérosols) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- L'adaptateur courant alternatif inclus avec votre unité est spécialement fabriqué pour ce produit. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil et n'utilisez pas un adaptateur d'un autre appareil électrique à sa place.
- Certaines unités Dry & Store utilisent un rayonnement ultraviolet germicide (UV) pour la désinfection. Cette lumière ne s'éclairera pas lorsque le couvercle est ouvert. Ne modifiez pas ou ne neutralisez pas tout composant qui peut permettre une exposition au rayonnement ultraviolet (UV).*
- Si la lampe* se casse, débranchez immédiatement. Portez des gants lors du retrait des particules de verre. Jetez les de manière appropriée.

NOTE: Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, éviter, surveiller, traiter ou atténuer une maladie.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil fonctionne sur une plage de température allant de 35° à 40 °C (95° à 104 °F). Il pourra fonctionner correctement à des températures ambiantes allant de 18° à 30 °C (65° à 86 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

* Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si c'est le cas de votre appareil, ignorez les instructions ou commentaires faisant référence aux termes « germicide », « lumière bleue », « ultraviolets », « UV » ou « lampe ».

Introduction

Ce produit a été conçu pour tous les types d'appareils auditifs, y compris les équipements de prothèses auditives, dispositifs de masquage de bruit, moniteurs auriculaires et implants cochléaires. S'il est utilisé tous les jours, il éliminera l'accumulation nuisible d'humidité, séchera la cire d'oreille et désinfectera les surfaces exposées à sa lampe germicide. Il permettra d'améliorer le son de la plupart des appareils auditifs et il peut également rallonger la vie de piles zinc-air dans des endroits à haute teneur en humidité. Avec son exclusivité Dry-Max™ technologie, Dry & Store supprime l'accumulation d'humidité dommageable, assèche le cérumen, et assainit les surfaces exposées à sa lampe germicide (le cas échéant).

Avant la première utilisation (important)

- 1. Activez le dessiccateur:** Un Dry-Brik jetable, devant être remplacé tous les deux mois, est inclus. Le Dry-Brik réalise trois fonctions importantes: (1) il élimine en permanence les molécules humidité libérées par les dispositifs pendant le cycle de séchage; (2) il conduit l'humidité relative à l'intérieur du boîtier à un niveau bien inférieur à celui permis par un réchauffeur, ce qui améliore la capacité de séchage; and (3) pour capter les odeurs.

Pour activer le Dry-Brik, retirez la feuille protectrice (**Figure 1**). Ne la retirez pas avant d'être prêt à utiliser Dry-Brik car une fois retirée, le Dry-Brik commence à absorber l'humidité.



- 2. Inscrivez la date d'activation:** Pour vous alerter lorsqu'il est temps de le remplacer, une carte est fixée sur chaque Dry-Brik. Inscrivez la date à laquelle le Dry-Brik a été mis en service sur cette carte (**Figure 2**).



NOTE: Pour garantir des performances optimales, remplacez le Dry-Brik tous les 2 mois.



- 3. Placez le Dry-Brik activé dans votre unité, comme illustré en Figure 3.**

- 4. Branchez l'adaptateur courant alternatif:** La petite prise circulaire se branche sur l'arrière de l'unité (**Figure 4**). Ne la forcez pas, elle doit pénétrer facilement. Enfin, branchez l'adaptateur courant alternatif dans une prise électrique active.



Mode d'emploi

1. Essayez l'excès d'humidité et de cire d'oreille de vos prothèses auditives avant de les place dans la chambre de séchage. Ouvrez le couvercle et placez vos appareils auditifs ou prothèses dans le large compartiment sur la droite. Vous pouvez laisser les piles dans vos appareils, mais ouvrez le couvercle de pile afin de permettre à l'air de circuler.
2. Fermez le couvercle et appuyez doucement sur le bouton « Marche », situé sur la façade de l'appareil (**Figure 5**). Une lumière verte, visible derrière le bouton « Marche », est présente tout au long du cycle de séchage (8 heures environ). Un cycle complet de 8 heures permet d'obtenir des résultats optimaux, mais des durées de 30 minutes seulement sont efficaces. Toutes les opérations cessent à l'ouverture du couvercle, qui réinitialise l'horloge.



Si votre appareil possède une lampe de désinfection UV, un voyant bleu s'éclaire sur la partie supérieure de l'appareil environ 1,5 minutes après son démarrage, indiquant que le cycle de désinfection a commencé.

3. Il est important de remplacer le Dry-Brik deux mois après la date d'activation afin d'assurer un niveau de soin maximum de vos appareils auditifs. Éliminez le Dry-Brik épuisé dans les déchets ménagers.

À propos du cycle de désinfection par UV*

Les contours d'oreilles et les prothèses auditives peuvent contenir des germes et bactéries. Certains modèles sont équipés d'une lumière ultraviolette germicide qui peut détruire de tels organismes et de nombreux utilisateurs pourront ressentir une réduction d'irritation et de démangeaison. L'effet de la désinfection est le plus fort à proximité de la lampe et diminue à mesure que l'on s'en éloigne. Cependant, cet appareil n'est pas un stérilisateur et le fabricant ne fait aucune déclaration quant à la quantité de bactéries détruites. Il n'est pas conçu pour diagnostiquer, éviter, surveiller, traiter ou atténuer une maladie. Votre lampe UV peut être enlevée sans affecter les capacités de séchage, car elle ne fait pas partie du cycle de chauffage.

Utilisation avec des implants cochléaires

Le matériel d'implant doit rester sec pour fonctionner correctement et son utilisation régulière peut éliminer l'accumulation d'humidité venant de l'environnement et/ou de la perspiration. Certains utilisateurs pourront constater une amélioration de la durée de vie de la pile zinc-air, tout spécialement avec des climats chauds et humides. Les résultats individuels peuvent varier. Voici quelques suggestions spécifiques:

- **Processeurs vocaux derrière l'oreille:** Laissez les piles zinc-air dans le processeur (lorsque cela est applicable) mais enlevez le couvercle de piles. Placez le processeur, le contour d'oreille et le câble dans le compartiment de séchage sur la droite. Mettez uniquement le dessiccateur sur la gauche du bac.
- **Processeurs vocaux à porter sur soi:** Placez autant de composants que possible dans le compartiment de séchage, de façon à ce qu'ils se rangent correctement sans trop surcharger le compartiment et que l'air circule librement. Les limitations de taille devront peut-être vous obliger à conditionner le processeur séparément. Si cela est le cas, l'ensemble du microphone devra être entretenu plus souvent que le processeur, car il est plus susceptible à une détérioration

par l'humidité. Le bloc pile aura peut-être besoin d'être enlevé de certains processeurs si la taille dépasse celle du compartiment de séchage.

Entretien général du produit

Pour des résultats optimaux, ne faites pas fonctionner cet appareil dans des endroits très humides, par exemple une salle de bain. Maintenez le couvercle fermé tout le temps, car l'efficacité du dessiccateur sera réduite à cause de l'absorption d'humidité de l'air environnant. Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'agents de nettoyage puissants ou de produits abrasifs. Ne vaporisez pas de liquide dans le bac ou sur la lampe UV.

Résolution des problèmes

- *Aucune lumière ne s'éclaire après avoir appuyé sur le bouton « Marche »:* Le couvercle est-il hermétiquement fermé et le bouton « Marche » est-il enclenché ? Si oui, vérifiez que l'adaptateur courant alternatif est bien branché à l'appareil et à la prise/secteur, mais aussi que la prise/secteur ne sont pas contrôlés par un interrupteur mural en position fermée. Ensuite, essayez un autre adaptateur courant alternatif (disponible sur le lieu d'achat, au centre de service ou sur le www.dryandstore.com). Remplacez-le uniquement par un adaptateur fourni par le fabricant. Si l'appareil ne démarre toujours pas, le système électronique interne est probablement défectueux. Renvoyez-le sur le lieu d'achat ou au centre de service pour examen.
- *L'unité est bruyante:* Les problèmes de bruit sont normalement en rapport au ventilateur. Le son résonne à l'intérieur de l'unité, et il est normal qu'il y ait du bruit, même avec les ventilateurs à roulements à billes de haute qualité utilisés dans ce produit. Si le bruit venant du ventilateur varie en intensité ou en fréquence, débranchez l'unité de l'alimentation électrique et vérifiez s'il y a des obstructions. Si ce n'est pas le cas, faites effectuer un entretien sur l'unité.
- *L'unité ne sèche pas correctement:* Est-ce que le Dry-Brik a été remplacé régulièrement ? Il est important qu'il soit remplacé tous les deux mois, conformément aux instructions. Vérifiez si le ventilateur est en mouvement. Si vous n'entendez pas le ventilateur, renvoyez l'unité là où vous l'avez acheté ou au centre de service pour évaluation.

Pour les unités équipées d'une lampe UV:

- *Aucune lumière bleue n'est visible au cours des 1½ premières minutes du cycle de fonctionnement, mais la lumière verte est allumée:* Vérifiez que la lampe UV est bien en place dans sa douille. Sinon, retirez-la, puis repositionnez-la. Ensuite, redémarrez l'appareil lorsque le couvercle est hermétiquement fermé. Si la lumière bleue ne s'allume pas au cours des 1½ premières minutes, remplacez la lampe UV (disponible sur le lieu d'achat, au centre de service et sur le www.dryandstore.com). Si aucune des lumières bleue et verte ne s'allume, voir « Aucune lumière ne s'allume... » ci-dessus.
- *Bille de métal à l'intérieur de la lampe UV:* Les lampes de certains fabricants ont une bille de métal à l'intérieur du tube, ce qui est parfaitement normal. C'est le résultat de leur processus de fabrication respectueux de l'environnement qui limite les polluants aérobies.

Si aucune de ces solutions ne résout le problème:

En Amérique du Nord, appelez le service client au 1-888-327-1299 ou visitez www.dryandstore.com

Dans les autres pays, contactez le lieu d'achat ou le centre de service pour évaluation.

* Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si c'est le cas de votre appareil, ignorez les instructions ou commentaires faisant référence aux termes « germicide », « lumière bleue », « ultraviolets », « UV » ou « lampe ».