

Használati Utasítás FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

VESZÉLY – Az áramütés veszélyének elkerüléséhez:

- Ne használja fürdés közben!
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan a kádba vagy a mosdókagylóba juthat!
- Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba!
- Ne nyúljon a készülékért, ha az vízbe esett! Azonnal szüntesse meg a hálózati csatlakozást!

VIGYÁZAT – Az égés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés elkerüléséhez:

- Gondosan felügyelje a használatot, ha azt gyermekek vagy más személyek, illetve ezek közelében végzik!
- Kizárólag e kézikönyvben leírt célra használja a készüléket!
- Sohase működtesse a terméket sérült csatlakozó zsinórral vagy dugóval, ha az nem működik megfelelően, ha az leesett vagy megsérült, illetve vízbe esett! Vizsgálat és javítás céljából vigye vissza azt az értékesítőhöz vagy a szerviz központba!
- Sohase helyezze a terméket puha felületre, például, heverőre vagy ágyra! Tartsa a szellőzőnyílásokat szösztől, hajtól és hasonlóktól mentesen!
- Ne használja szabadban, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszol (permetező) termékeket használnak, vagy ahová oxigént vezetnek be!
- Az egységhez tartozó hálózati adapter kifejezetten ehhez a termékhez készült. Ne használja ezt más készülékhez, és ne használjon e helyett más elektromos készülékhez tartozó adaptert!
- Bizonyos Dry & Store termékek baktériumölő ibolyántúli (UV) fényt alkalmaznak a fertőtlenítéshez. A fedél felnyitásakor az UV lámpa nem fog világítani. Ne módosítson vagy hatástalanítson egyetlen olyan alkatrészt sem, ami az ibolyántúli fényt szabaddá teszi!*
- Ha a lámpa fénye* halványul, azonnal csatlakoztassa le a hálózatról. Az üvegszilánkok eltávolításánál viseljen kesztyűt! Selejtezze le megfelelően!

MEGJEGYZÉS – Ez a termék nem betegség diagnosztizálására, megelőzésére, figyelésére, kezelésére vagy enyhítésére készült.

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

A készülék működési hőmérséklet-tartománya 35 °C és 40 °C (95 °F és 104 °F). Ez a készülék megfelelően fog működni 18 °C és 30 °C (65 °F és 86 °F) közötti szobahőmérsékleten.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Bevezetés

Ezt a terméket mindenféle hallásjavító készülékhez készítették, beleértve a hallókészülékeket, zajsűrőket, füldugókat és az implantált eszközöket. A napi használata hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb hallásjavító készülék jobban működjön, tovább tartson, és nagyfokú megbízhatósággal működjön, használatával magas páratartalmú környezetben is megnövelhető a cink-levegő elem élettartama. Az egyedülálló Dry-Max™ technológiának köszönhetően a Dry & Store eltávolítja a felgyűlő ártalmas nedvességet, a fülzsírt, és fertőtleníti a baktériumölő lámpa által megvilágított felületeket (ahol van ilyen).

Az első használat előtt (Fontos)

1. **Aktiválja a szárító készüléket:** Egy eldobható, kéthavonta cserélendő Dry-Brik® a csomag része. A Dry-Brik három fontos funkciót tölt be: (1) véglegesen eltávolítja a nedvességet kiváltó, az eszközökből a szárítási ciklus során felszabaduló molekulákat, (2) a dobozon belüli relatív páratartalmat sokkal alacsonyabb szintre szorítja le, mintha csupán légfűtést alkalmaznánk, ezáltal maximalizálja a készülék szárító képességét, és (3) megköti az illatokat.

A Dry-Brik aktiválásához távolítsa el a védőfóliát (1. ábra). Ne távolítsa el a védőfóliát, amíg nem áll készen a Dry-Brik használatára, mivel amint eltávolította a védőfóliát, a Dry-Brik azonnal elkezd magába szívni a nedvességet.




MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény érdekében kéthavonta cserélje ki a Dry Brik terméket.



2. **Jegyezze fel az aktiválás dátumát:** Minden Dry-Brik egy kártyával rendelkezik az oldalán, mely figyelmeztet arra, mikor esedékes a cseréje. Jegyezze fel erre a kártyára azt a dátumot, amikor a Dry-Brik használatát először megkezdte (2. ábra).



A Dry&Store készüléke csak akkor fog hatékonyan működni, ha a Dry-Briket minden 2. hónapban kicseréli.

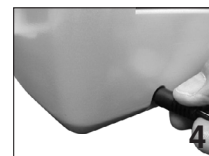

3. **Helyezze az aktivált Dry Brik terméket a készülékbe, a 3. ábra szerint.**
4. **A hálózati adapter csatlakoztatása:** A kis hengeres csatlakozó dugó az egység hátuljába illeszkedik (4. ábra).

* Bizonyos típusok nem tartalmaznak baktériumölő lámpát. Ha ez érvényes az Ön készüléke esetében is, akkor hagyjon figyelmen kívül minden olyan utasítást és megjegyzést, mely az alábbiakra utal: „baktériumölő”, „kék fény”, „ibolyántúli”, „UV” és „lámpa”.

Ne erőltesse, mivel annak könnyen kell becsúsznia!
Végül csatlakoztassa a hálózati adaptert egy aktív hálózati aljzathoz!

Használati utasítás

1. Törölje le a felesleges nedvességet és fülzsírt hallókészülékeiről, mielőtt a szárítókamrába helyezi azokat! Nyissa fel a fedelet és helyezze hallásjavító készülékeit vagy implantátumai külső részeit a jobboldali nagy rekeszbe! Bennhagyhatja az elemeket, de nyissa ki az elemtartó fedelét a levegő keringés biztosításához!

2. Zárja le a fedelet, és finoman nyomja meg a start gombot, mely a készülék elülső oldalán található (5. ábra). A start gomb mögött zöldes fény jelenik meg a szárítási ciklus teljes időtartamára, mely körülbelül 8 óra. A legjobb eredményt egy teljes 8 órás ciklus nyújtja, de az akár 30 percnyi időszakok is hatásosak. A készülék működése leáll, ha a fedelet felnyitják, és ekkor a számláló is visszaáll a kezdő állapokra.



Ha a készüléke tartalmaz fertőtlenítő UV lámpát, akkor a készülék tetején kék fény lesz látható 1½ percig a készülék elindítása után, mely azt jelzi, hogy a fertőtlenítő ciklus működőképes.

3. Fontos, hogy az aktiválás dátumától számított két hónapon belül cserélje le a Dry-Brik terméket annak érdekében, hogy a hallásjavító készülékeinek legmagasabb szintű ápolását tudja megvalósítani. Az elhasznált Dry-Brik terméket helyezze a háztartási hulladékok közé.

Az ibolyántúli fényvel végzett higiénizálási ciklus*

A fül dugókon és a hallásjavító készülékeken csírák, baktériumok telepedhetnek meg. Bizonyos típusok tartalmaznak olyan baktériumölő UV lámpát, mely ezen organizmusokat elpusztítja, és számos felhasználó ennek eredményeként kevesebb viszkető és irritáló érzésről számolt be. A fertőtlenítő hatás a lámpához legközelebb a legerősebb, és a távolsággal csökken. Azonban ez a készülék nem sterilizáló készülék, és a gyártó nem vállal felelősséget a baktériumölő hatás mértékéért. A készülék nem betegség diagnosztizálására, megelőzésére, figyelésére, kezelésére vagy enyhítésére készült. Az UV lámpa eltávolítható a szárítási teljesítmény befolyásolása nélkül, mivel az nem része a melegítési munkaciklusnak.

Használat implantátum készülékkel

Az implantátumokat megfelelő működésük érdekében szárazon kell tartani, a készülék rendszeres használata eltávolítja a környezetből és/vagy a verejtékezéstől felgyűlt nedvességet. Bizonyos felhasználók javulást érezhetnek a cink-levegő elemek élettartamában, különösen forró és nedves időjárás esetén. A hatások egyénenként változóak. Álljon itt néhány jellemző javaslat:

- **Fül mögötti beszédprocesszorok:** Hagyja a cink-levegő elemeket a processzorban (ahol alkalmas), de távolítsa el az elemtartó fedelét! Helyezze a processzort, a jelátvivőt és a kábelt a jobboldali szárító rekeszbe! A szárítószereken kívül semmit se helyezze a baloldali tálcába!
- **Testen viselt beszédprocesszorok:** Helyezzen annyit alkatrészt a szárító rekeszbe, amennyi kényelmesen, túlzásfólyás nélkül elfér, hogy a légáramlás akadálytalan legyen. A méretkorlátozás azt is jelentheti, hogy a processzort

más részegységektől külön kell kezelni. Ilyen esetben a mikrofont gyakrabban kell kezelni, mint a processzort, mivel az hajlamosabb a nedvesség okozta károsodásra. Az elemcsomagot valószínűleg el kell távolítani bizonyos processzorokból, ha a kombinált méretük a szárító rekeszhez képest túl nagy.

A termék általános gondozása

A legjobb eredmény érdekében ne működtesse ezt a készüléket magas nedvességtartalmú helyeken, például fürdőszobában. Tartsa a fedelet állandóan zárva, mivel a szárítószere hatékonyságát csökkenti a környező levegőből elnyelt nedvesség. Végezze a tisztítást puha ronggyal! Sose használjon erős tisztító- vagy súrolószert! Ne permetezzen semmilyen folyadékot a tálcába vagy az UV lámpára!

Hibaelhárítás

- *Nem világítanak a lámpák a start gomb megnyomása után:* Szorosan zárva van a fedél és megnyomta a start gombot? Ha igen, ellenőrizze, hogy a váltóáramú adapter jól kapcsolódik-e mind a készülékhez, mind a hálózati aljzathoz, és hogy a hálózati aljzat nincs-e olyan falikapcsolóval szabályozva, amely ki van kapcsolva. Ez után próbáljon ki egy másik adaptert (beszerezhető a vásárlás helyén, a szerviz központban, vagy a www.dryandstore.com oldalon). Csak a gyártó által szolgáltatott adapterrel helyettesítse. Ha az egység még mindig nem indul el, valószínűleg a belső elektronikája lehet hibás, ezért juttassa vissza a vásárlás helyére vagy a szerviz központba, hogy megvizsgálják.
- *Az egység zajos:* A zaj általában a ventilátorral kapcsolatos. A készülékben rezonál a hang, ezért valamennyi zaj tapasztalható még a termékben található magas minőségű csapágyas ventilátortól is. Ha a ventilátorzaj erőssége vagy frekvenciája változik, csatlakoztassa le az egységet a hálózatról és ellenőrizze az akadályt! Ha nincs akadály, szervizeltesse az egységet!
- *A készülék nem szárít megfelelően:* Rendszeresen cserélte a Dry Brik betétet? Fontos az utasítások szerinti rendszeres csere elvégzése. Amennyiben nem hallható ventilátor zaj, vigye vissza az egységet az értékesítőhöz vagy vigye a szerviz központba, kiértékelés céljából!

For units that include a UV lamp:

- *Nincs látható kék fény a működési ciklus első 1½ percében, de a zöld lámpa világít:* Ellenőrizze, hogy az UV lámpa szilárdan helyezkedik-e el a foglalatban. Ha nem, távolítsa el és helyezze újra a helyére a lámpát, majd indítsa el újra az egységet szorosan zárt fedővel. Ha a kék fény nem világít az első 1½ perc alatt, cserélje ki az UV lámpát (beszerezhető a vásárlás helyén, a szerviz központban, vagy a www.dryandstore.com oldalon). Csak a gyártó által szolgáltatott speciális lámpával helyettesítse. Ha sem a kék, sem a zöld lámpa nem világít, lásd fenn a „Nem világítanak a lámpák” címszónál.
- *Fémcsépp az UV lámpában:* A lámpa gyártójától függően bizonyos lámpáknál fémcsépp van a csőben, ami normális. Ez a cége környezetkímélő gyártási folyamatának eredménye.

Amennyiben a fentiek egyike sem szünteti meg a problémát:

Észak-Amerikában hívja az ügyfélszolgálatot az 1-888-327-1299 számon vagy látogasson a www.dryandstore.com honlapra.

Észak-Amerikán kívül lépjen kapcsolatba az értékesítővel vagy a szerviz központtal, kiértékelés céljából.

* Bizonyos típusok nem tartalmaznak baktériumölő lámpát. Ha ez érvényes az Ön készüléke esetében is, akkor hagyjon figyelmen kívül minden olyan utasítást és megjegyzést, mely az alábbiakra utal: „baktériumölő”, „kék fény”, „ibolyántúli”, „UV” és „lámpa”.