

DRY&STORE®

Instruções de funcionamento RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este produto destina-se a utilização doméstica. Ao utilizar produtos eléctricos, especialmente quando estão presentes crianças, devem ser sempre seguidas as precauções de segurança básicas, incluindo:

ANTES DE UTILIZAR, LER TODAS AS INSTRUÇÕES

PERIGO – Para reduzir o risco de electrocussão:

- Não utilizar durante o banho.
- Não colocar nem guardar o produto onde possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório.
- Não colocar nem deixar cair em água ou outro líquido.
- Não tentar alcançar o produto, se tiver caído dentro de água. Desligar imediatamente.

AVISO – Para reduzir o risco de queimaduras, electrocussão, fogo ou ferimentos a pessoas:

- Controlar atentamente a utilização por parte de ou perto de crianças ou inválidos.
- Utilizar apenas este produto para o fim a que se destina como descrito neste manual.
- Nunca utilizar este produto se tiver um cabo ou ficha danificados, se não estiver a funcionar correctamente, se tiver caído ou danificado ou se tiver caído dentro de água. Devolvê-lo ao local de compra ou centro de assistência para examinação e reparação.
- Nunca colocar o produto numa superfície macia como por exemplo numa cama. Manter todas as aberturas isentas de cotão, cabelos ou produtos semelhantes.
- Não utilizar no exterior nem funcionar onde estejam a ser utilizados aerossóis (spray) nem onde esteja a ser administrado oxigénio.
- O adaptador CA incluído com a unidade foi fabricado especificamente para este produto. Não utilizar com outro aparelho e não utilizar um adaptador de outro equipamento em substituição deste.
- Algumas unidades Dry & Store utilizam luz ultravioleta (UV) germicida por questões sanitárias. Esta luz não ilumina quando a tampa está aberta. Não modificar nem substituir quaisquer componentes que possam permitir a exposição à luz UV.*
- No caso de a lâmpada se partir, desligar imediatamente. Utilizar luvas quando remover as partículas de vidro. Eliminar de forma adequada.

NOTA – Este produto não foi concebido para diagnosticar, prevenir, verificar, tratar ou aliviar doenças.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

O intervalo da temperatura de funcionamento deste aparelho é de 35° a 40° C (95° a 104° F). Este aparelho funciona adequadamente a uma temperatura ambiente interior de 18° a 30° C (65° a 86° F).

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Introdução

Este produto foi concebido para todos os tipos de instrumentos de audição, incluindo auxiliares de audição, protectores de ruído, monitores de ouvido e equipamento de implante coclear. Utilizado diariamente, remove a acumulação de humidade, seca a cera do ouvido e limpa as superfícies expostas à lâmpada germicida. A maior parte dos

instrumentos de audição têm um melhor som além de prolongar a vida da bateria de zinco especialmente em locais de elevada humidade.

Antes de usar pela primeira vez (Importante)

1. Activar o dessecante: encontra-se incluído um Dry-Brik descartável que deve ser substituído a cada dois meses. O Dry-Brik desempenha duas funções importantes: (1) remoção das moléculas de humidade que se libertam dos aparelhos durante o ciclo de secagem e (2) reduzir a humidade relativa dentro da caixa para níveis bastantes mais inferiores do que seria possível apenas com um aquecedor, maximizando, desta forma, a capacidade de secagem.

Para activar o Dry-Brik, remova a película de alumínio (**Figura 1**). Não remova o alumínio enquanto não estiver pronto a utilizar o Dry-Brik, porque depois de o remover, o Dry-Brik irá começar a absorver a humidade.



2. Registe a data de activação: para alertá-lo da altura de substituição, encontra-se ligado um cartão a cada Dry-Brik. Escreva nesse cartão a data em que o Dry-Brik foi activado (**Figura 2**).



NOTA – Para garantir o desempenho máximo, troque o Dry-Brik a cada 2 meses.

3. Coloque o Dry-Brik activado na sua unidade, conforme se ilustra na **Figura 3**.



4. Ligue o transformador CA: A pequena ficha circular encaixa na parte de trás da unidade (**Figura 4**). Não force; deve entrar facilmente. Finalmente, ligue o transformador CA a uma tomada eléctrica funcional.



Instruções de utilização

1. Limpe o excesso de humidade e cera dos seus dispositivos de audição antes de os colocar na câmara de secagem. Abra a tampa e coloque os instrumentos de audição ou hardware de implante no compartimento grande à direita. Pode deixar as pilhas colocadas, mas retire a tampa do compartimento das pilhas para permitir a circulação de ar.



2. Feche a tampa e prima com cuidado o botão “ligar” na frente da unidade (**Figura 5**). Durante todo o ciclo de secagem, que dura 8 horas, estará presente um brilho verde atrás do botão “ligar”. O ciclo de 8 horas completo fornece os melhores resultados, mas períodos de até 30 minutos serão benéficos. Todas as operações são interrompidas quando a tampa é aberta e o temporizador é reiniciado.

Se sua unidade tiver uma lâmpada de desinfecção UV, uma luz



* Alguns modelos não têm lâmpada germicida. Se isto se aplicar ao seu aparelho, ignore as instruções ou comentários relacionados com “germicida”, “luz azul”, “ultravioleta”, “UV” ou “lâmpada”.

azul ficará visível no topo da unidade por 1½ minuto após ligar a unidade, indicando que o ciclo de desinfecção está em operação.

Se a sua unidade tiver uma lâmpada UV de sanitização, será visível uma luz azul na parte de cima da unidade durante um minuto e meio depois de a unidade ter sido ligada, indicando que o ciclo de sanitização foi activado.

3. É importante que o Dry-Brik seja substituído dois meses após ter sido activado, para garantir o nível de cuidado máximo para os seus instrumentos auditivos. Elimine o Dry-Brik gasto juntamente com os resíduos domésticos.

Sobre o Ciclo de Sanitização UV*

Os moldes e auxiliares auditivos albergam germes e bactérias. Alguns modelos incluem uma lâmpada UV germicida que destrói esses organismos e muitos utilizadores notam, por isso, uma menor irritação e comichão. O efeito de sanitização é mais forte próximo da lâmpada e diminui com a distância. No entanto, este aparelho não é um esterilizador e o fabricante não aceita reclamações sobre o nível de destruição de bactérias. Não foi concebido para diagnosticar, prevenir, verificar, tratar ou aliviar doenças. A lâmpada UV pode ser removida sem afectar as capacidades de secagem, uma vez que não faz parte do ciclo de aquecimento.

Utilização com equipamento de implante

O hardware de implante tem de permanecer seco para funcionar adequadamente e a utilização regular deste aparelho pode eliminar a humidade do ambiente acumulada e/ou a perspiração. Alguns utilizadores poderão notar uma melhoria na duração da bateria de zinco-ar, especialmente em clima quente e húmido. Os resultados individuais variam. Algumas sugestões específicas:

- **Processadores de fala atrás da orelha:** deixe as baterias de zinco-ar no processador (se aplicável), mas retire a tampa da bateria. Coloque o processador, a peça e o cabo no compartimento de secagem à direita. Não coloque nada excepto o dessecante no lado esquerdo do tabuleiro.
- **Processadores de fala usados no corpo:** coloque tantos componentes no compartimento de secagem quantos couberem sem ficarem demasiado apertados, para não obstruir o fluxo de ar. As limitações de espaço podem significar que o processador vai precisar de ser sujeito a manutenção em separado das restantes peças. Se for este o caso, o conjunto do microfone deve ser objecto de uma manutenção mais frequente do que o processador, uma vez que é mais susceptível a danos provocados pela humidade. O conjunto de baterias poderá ter de ser removido de alguns processadores, se o tamanho total for muito grande para o compartimento de secagem.

Cuidados gerais com o produto

Para obter os melhores resultados, não utilize este aparelho em locais com um elevado grau de humidade, como por exemplo numa casa-de-banho. Mantenha a tampa sempre fechada, porque a eficácia do dessecante é reduzida com a absorção de humidade do ar ambiente. Limpar com um pano macio. Nunca usar agentes de limpeza fortes ou abrasivos. Não aspergir nenhum líquido para o tabuleiro ou para a lâmpada UV.

Resolução de problemas

- *As luzes não se acendem depois de premir o botão “ligar”:* a tampa está bem fechada e carregou no botão “ligar”? Se sim, certifique-se de que o transformador CA se encontra devidamente ligado à unidade e à ficha/corrente e que esta não é controlada por um interruptor de parede que se encontra desligado. Em seguida, experimente outro transformador CA (disponível no local de compra, no centro de assistência ou em www.dryandstore.com). Substituir apenas por um transformador fornecido pelo fabricante. Se a unidade não ligar, é provável que haja uma avaria nos componentes electrónicos internos, pelo que devolva-a ao local onde a comprou ou ao centro de assistência para fins de avaliação.
- *Unidade emite ruídos:* os problemas de ruído estão, geralmente, relacionados com a ventoinha. O som ressoa dentro da unidade, pelo que é previsível algum ruído, mesmo com a ventoinha de rolamentos de esferas de elevada qualidade utilizada neste produto. Se o barulho da ventoinha variar de intensidade ou frequência, desligue a unidade da corrente e verifique se existem obstruções. Se não existirem, envie a unidade para reparação.
- *A unidade não seca devidamente:* o Dry-Brik foi substituído regularmente? É importante que seja substituído a cada dois meses de acordo com as instruções. Inspeccione o movimento da ventoinha. Se não conseguir ouvir qualquer som da ventoinha, devolva a unidade ao local de compra ou ao centro de assistência para avaliação.

Para as unidades que incluem uma lâmpada UV:

- *Não se encontra visível nenhuma luz azul durante o primeiro minuto e meio do ciclo de funcionamento, mas a luz verde está ligada:* Verifique se a lâmpada UV está bem colocada no casquilho. Caso contrário, retire e reposicione a lâmpada e depois volte a ligar a unidade com a tampa bem fechada. Se a luz azul não se acender durante o primeiro minuto e meio, substitua a lâmpada UV (disponível no local de compra, num centro de assistência ou em www.dryandstore.com). Substituir apenas por uma lâmpada especial fornecida pelo fabricante. Se ambas as luzes azul e verde não se acenderem, consulte a secção “As luzes não se acendem...” acima.
- *Conta de metal dentro da lâmpada UV:* dependendo do fabricante da lâmpada, algumas lâmpadas têm uma conta de metal dentro do tubo o que é perfeitamente normal. É o resultado de um processo de fabrico sensível ao ambiente que minimiza os poluentes em suspensão no ar.

Se nenhuma das soluções apresentada solucionar o problema:

Na América do Norte, contactar o Apoio a Clientes pelo 1-888-327-1299 ou visitar www.dryandstore.com.

Fora da América do Norte, contactar o local de compra ou o centro de assistência para solicitar uma avaliação.

* Alguns modelos não têm lâmpada germicida. Se isto se aplicar ao seu aparelho, ignore as instruções ou comentários relacionados com “germicida”, “luz azul”, “ultravioleta”, “UV” ou “lâmpada”.