

# DRY & STORE®

## Instruções de Operação RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este produto destina-se à utilização doméstica. Ao utilizar produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo:

### LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO

**PERIGO** – Para reduzir o risco de eletrocução:

- Não utilize durante o banho.
- Não coloque nem guarde o produto em locais de onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia.
- Não coloque nem deixe cair na água ou em outro líquido.
- Não tente alcançar este aparelho se ele tiver caído na água. Desligue-o imediatamente.

**ADVERTÊNCIA** – Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocução, incêndio ou ferimentos às pessoas:

- Supervisione atentamente o uso do aparelho por crianças ou próximo a crianças ou deficientes.
- Use este produto somente para o fim a que se destina, conforme descrito neste manual.
- Nunca opere este produto se houver um fio ou tomada danificados, se ele não estiver funcionando adequadamente, se tiver sido derrubado, danificado ou se tiver caído na água. Devolva-o ao local de aquisição ou centro de assistência para verificação e reparos.
- Nunca coloque o produto em uma superfície mole, como em uma cama. Mantenha todas as saídas de ar livres de fiapos, cabelos e sujeiras semelhantes. Não o utilize em ambiente externo nem o opere onde ocorra o uso de produtos em aerossol (spray) ou administração de oxigênio.
- O adaptador de CA incluso em sua unidade é projetado especificamente para este produto. Não o utilize com qualquer outro equipamento e não utilize um adaptador de qualquer outro equipamento elétrico em seu lugar.
- Algumas unidades Dry & Store utilizam luz ultravioleta germicida (UV) para desinfecção. Esta luz não vai se acender quando a tampa for aberta. Não modifique nem substitua qualquer componente que possa permitir a exposição à luz UV.\*
- Se a lâmpada\* se quebrar, desligue imediatamente. Use luvas para remover as partículas de vidro. Descarte adequadamente.

**NOTA** – Este produto não foi projetado para diagnosticar, prevenir, monitorar, tratar ou aliviar doenças.

### CONDIÇÕES OPERACIONAIS

A faixa de temperatura operacional deste aparelho é de 35° a 40° C (95 a 104° F). Este aparelho funciona adequadamente a temperaturas ambientes externas de 18° a 30° C (65° a 86° F).

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

### Introdução

Este produto foi projetado para todos os tipos de instrumentos auditivos, incluindo auxiliares auditivos, mascaradores de zumbido, monitores auditivos e equipamentos de implante. Usado diariamente, ele pode ajudar a maioria dos instrumentos auditivos a soar melhor, durar mais e ter um desempenho com alto grau de confiabilidade; além disso, em condições de alta umidade, a vida da bateria zinco-ar pode ser estendida. Com sua exclusiva tecnologia Dry-Max™, o Dry & Store

remove o acúmulo de umidade nocivo, seca a cera de ouvido e desinfeta as superfícies expostas a sua lâmpada germicida (quando aplicável).

### Antes de usar pela primeira vez (Importante)

1. **Ative o dessecante:** encontra-se incluído um Dry-Brik descartável que deve ser substituído a cada dois meses. O Dry-Brik desempenha três funções importantes: (1) remove permanentemente as moléculas de umidade que são liberadas dos aparelhos durante o ciclo de secagem; (2) leva a umidade relativa de dentro da caixa para um nível muito mais baixo do que seria possível apenas com um aquecedor, maximizando assim a capacidade de secagem; e (3) captura odores.

Par ativar o Dry-Brik, remova a proteção de alumínio (**Figura 1**). Não remova o alumínio até que você esteja pronto para usar o Dry-Brik pois, uma vez removido, o Dry-Brik começará a absorver a umidade.



2. **Registre a data da ativação:** Para alertá-lo sobre o momento de substituição, existe um cartão afixado a cada Dry-Brik. Anote a data em que o Dry-Brik foi ativado neste cartão (**Figura 2**).



**NOTA** – Para garantir o desempenho máximo, troque o Dry-Brik a cada 2 meses.

3. **Coloque o Dry-Brik ativado** na sua unidade, conforme mostrado na **Figura 3**.



4. **Conecte o adaptador de CA:** A pequena tomada circular se encaixa na parte traseira da unidade (**Figura 4**). Não a force; ela deve se encaixar facilmente. Finalmente, ligue o adaptador de CA a uma tomada elétrica ativa.



### Instruções de uso

1. Limpe o excesso de umidade e cera dos seus auxiliares auditivos antes de colocá-los na câmara de secagem. Abra a tampa e coloque os instrumentos auditivos ou hardware de implante no compartimento grande à direita. Você pode deixar as pilhas colocadas, mas deve retirar a tampa do compartimento das pilhas para permitir a circulação de ar.
2. Feche a tampa e aperte levemente o botão "ligar" na frente da unidade (**Figura 5** ⏻).



Durante todo o ciclo de secagem, que dura 8 horas, você verá um brilho verde atrás do botão "ligar". O ciclo de 8 horas completo fornece os melhores resultados, mas períodos de até 30 minutos serão benéficos. Todas as operações são interrompidas quando a tampa é aberta e o temporizador é reiniciado.



\* Alguns modelos não contêm uma lâmpada germicida. Caso isso se aplique a seu aparelho, desconsidere qualquer instrução ou comentário referente a "germicida", "luz azul", "ultravioleta", "UV" ou "lâmpada".

Se sua unidade tiver uma lâmpada de desinfecção UV, uma luz azul ficará visível no topo da unidade por 1½ minuto após ligar a unidade, indicando que o ciclo de desinfecção está em operação.

3. É importante que o Dry-Brik seja substituído dois meses após a data de ativação para garantir o nível de cuidado máximo para os seus instrumentos auditivos. Elimine o Dry-Brick gasto juntamente com os resíduos domésticos.

#### Sobre o Ciclo de Desinfecção UV\*

Os moldes e auxiliares auditivos abrigam germes e bactérias. Alguns modelos incluem uma lâmpada UV germicida que destrói esses organismos, e muitos utilizadores notam, por isso, uma redução nas sensações de irritação e coceira. O efeito de desinfecção é mais forte próximo da lâmpada e diminui com a distância. No entanto, este aparelho não é um esterilizador e o fabricante não aceita reclamações sobre o nível de destruição de bactérias. O aparelho não foi projetado para diagnosticar, prevenir, monitorar, tratar ou aliviar doenças. A lâmpada UV pode ser removida sem afetar as capacidades de secagem, uma vez que não faz parte do ciclo de aquecimento.

#### Uso com equipamento de implante

O hardware de implante tem de permanecer seco para funcionar adequadamente, e a utilização regular deste aparelho pode eliminar a umidade do ambiente acumulada e/ou a perspiração. Alguns usuários poderão notar uma melhoria na duração da bateria de zinco-ar, especialmente em clima quente e úmido. Os resultados individuais variam. Algumas sugestões específicas:

- **Processadores de fala retroauriculares:** Deixe as baterias zinco-ar no processador (sempre que aplicável), mas retire a tampa da bateria. Coloque o processador, peça e cabo no compartimento de secagem à direita. Não coloque nada além do dessecante no lado esquerdo da bandeja.
- **Processadores de fala portáteis:** Coloque quantos componentes no compartimento de secagem couberem, sem que fiquem excessivamente apertados para não obstruir o fluxo de ar. As limitações de espaço podem significar que o processador vai precisar de ser limpo em separado das peças restantes. Se for este o caso, o conjunto do microfone deve receber uma manutenção mais frequente do que o processador, uma vez que é mais suscetível a danos provocados pela umidade. O conjunto de baterias poderá ter de ser removido de alguns processadores se o tamanho total for grande demais para o compartimento de secagem.

#### Cuidados gerais com o produto

Para obter os melhores resultados, não utilize este aparelho em locais com elevado grau de umidade, como por exemplo num banheiro. Mantenha a tampa sempre fechada, porque a eficácia do dessecante é reduzida com a absorção de umidade do ar ambiente. Limpe com um pano macio. Nunca use produtos de limpeza fortes ou abrasivos. Não borriفة nenhum líquido na bandeja ou na lâmpada UV.

#### Resolução de problemas

- *As luzes não se acendem depois de se pressionar o botão "ligar": A tampa está bem fechada e você apertou o botão "ligar"?.* Se sim, certifique-se de que o adaptador de CA esteja devidamente ligado à unidade e à tomada/alimentação e que esta não é controlada por um interruptor de parede que esteja desligado. Em seguida, tente outro adaptador de CA (disponível no local de compra, centro de assistência ou em [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Substitua apenas por um adaptador fornecido pelo fabricante. Se a unidade não ligar, é provável que haja danos nos componentes eletrônicos internos; então, devolva-a ao local de compra ou ao centro de assistência para fins de avaliação.
- *Unidade emite ruídos:* Os problemas de ruído estão, geralmente, relacionados com a ventoinha. O som ressoa dentro da unidade, e por isso algum ruído é previsível, mesmo com a ventoinha de rolamentos de esferas de elevada qualidade utilizada neste produto. Se o barulho da ventoinha variar de intensidade ou frequência, desligue a unidade da alimentação e verifique se existem obstruções. Se não houver, leve a unidade para conserto.
- *A unidade não seca devidamente:* O Dry-Brik foi substituído regularmente? É importante que ele seja substituído a cada dois meses de acordo com as instruções. Inspeção o movimento da ventoinha. Se não conseguir ouvir nenhum som da ventoinha, devolva a unidade ao local de compra ou ao centro de assistência para avaliação.

#### Para as unidades que incluem uma lâmpada UV:

- *A luz azul não fica visível durante o primeiro 1½ minuto do ciclo operacional, mas a luz verde está acesa:* Verifique se a lâmpada UV está bem colocada em seu soquete. Caso contrário, retire e reposicione a lâmpada e depois volte a ligar a unidade com a tampa bem fechada. Se a luz azul não se acender durante o primeiro 1½ minuto, substitua a lâmpada UV (disponível no local de compra, em um centro de assistência ou no site [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Substitua apenas por uma lâmpada especial fornecida pelo fabricante. Se ambas as luzes azul e verde não se acenderem, consulte a seção "As luzes não se acendem..." acima.
- *Conta de metal dentro da lâmpada UV:* Dependendo do fabricante da lâmpada, algumas lâmpadas possuem uma conta de metal dentro do tubo, o que é perfeitamente normal. Este é o resultado de um processo de fabricação sensível ao ambiente que minimiza os poluentes em suspensão no ar.

#### Se nenhuma das soluções apresentadas resolver o problema:

Na América do Norte, ligue para o Serviço ao Cliente no número 1-888-327-1299 ou visite o site [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Fora da América do Norte, entre em contato com o local de compra ou um centro de assistência para avaliação.

\* Alguns modelos não contêm uma lâmpada germicida. Caso isso se aplique a seu aparelho, desconsidere qualquer instrução ou comentário referente a "germicida", "luz azul", "ultravioleta", "UV" ou "lâmpada".