

Mode d'emploi

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, certaines précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment:

DANGER – Afin de réduire le risque d'électrocution:

- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Ne pas placer ou stocker pas le produit à un endroit depuis lequel il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas placer dans ou laisser tomber dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne pas essayer de récupérer cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure personnelles:

- Surveiller étroitement l'utilisation de ce produit par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- N'utiliser ce produit que dans le cadre de son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- Ne jamais utiliser ce produit si son câble d'alimentation ou sa prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute ou s'il est tombé dans l'eau. Dans ces situations, il convient de le retourner à son lieu d'achat pour contrôle et réparation.
- Ne jamais placer le produit sur une surface molle telle qu'un lit. Les aérations doivent être libres de toute poussière, peluche, cheveux ou autre obstruction.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou opérer lorsque des produits aérosols (spray) sont utilisés, ou lorsque de l'oxygène est administré.
- L'adaptateur secteur fourni avec votre appareil est spécialement conçu pour ce produit. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil et n'utilisez pas l'adaptateur d'un autre appareil électrique à sa place.
- DryMax-UV uniquement : La lampe ne s'allume que lorsque le couvercle est fermé afin d'éviter toute exposition à la lumière UV-C. Ne modifiez aucun composant pour contourner cette sécurité. Ne regardez pas directement la lampe UV-C lorsqu'elle est allumée. Si la lampe se brise, débranchez immédiatement l'appareil. Ne l'utilisez pas tant que l'appareil n'a pas été réparé par un centre de service agréé. Portez des gants lors de tout contact avec des particules de verre. Éliminer correctement.

REMARQUE: Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie.

CONDITIONS D'UTILISATION

La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 95 et 104° F (35° C et 40° C). Cet appareil fonctionnera correctement à des températures ambiantes intérieures de 65°-86° F (18°-30° C).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Introduction

Ce produit a été conçu pour tous les types d'aides auditives dont les prothèses auditives, les masques antibruit, les moniteurs auriculaires, les oreillettes, les amplificateurs et les équipements implantaires. Utilisé quotidiennement, il peut aider la plupart des aides auditives à avoir un meilleur son, à durer plus longtemps et à fonctionner de manière plus fiable. La technologie exclusive Dry & Store élimine l'humidité dommageable, sèche le cérumen, capte les odeurs et, dans des conditions d'humidité élevée, peut également prolonger la durée de vie de la batterie à air zinc. De plus, le modèle DryMax-UV améliore le confort en éliminant les bactéries qui sont la principale cause d'irritation de la peau chez les utilisateurs d'appareils auditifs.

Avant votre première utilisation (Important)

1. Activer le déshydratant: Un "Dry-Brik® Mini," jetable et devant être remplacé tous les mois, est inclus. Le Dry-Brik remplit trois fonctions importantes : (1) éliminer définitivement les molécules d'humidité qui sont libérées par les dispositifs auditifs pendant le cycle de séchage, (2) faire baisser l'humidité relative à l'intérieur du dispositif jusqu'à un niveau beaucoup plus bas que possible grâce à la seule action d'un réchauffeur, maximisant ainsi la capacité de séchage, et (3) capturer les odeurs.

Pour activer le Dry-Brik Mini, retirez la protection en aluminium. Ne retirez pas cette protection avant d'être prêt à utiliser le Dry-Brik, car une fois celle-ci retirée le Dry-Brik commencera à absorber l'humidité.



2. Notez la date d'activation. Pour vous avertir quand le moment d'un remplacement est arrivé, une carte est attachée à chaque Dry-Brik. Notez la date à laquelle le Dry-Brik a été mis en service sur cette carte.



REMARQUE : Pour assurer une performance maximale, changez le Dry-Brik Mini tous les mois.

3. Placez le Dry-Brik Mini activé dans votre appareil, comme illustré en Figure 3.



4. Connectez l'adaptateur secteur: La prise micro-USB se place à l'arrière de l'appareil. Ne forcez pas; elle devrait se connecter facilement. Enfin, branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique.



Mode d'emploi

1. Essayez l'excès d'humidité et le cérumen de vos aides auditives avant de les placer dans le compartiment de séchage.

Vous pouvez placer dans ce compartiment autant de composants que désiré, dans la mesure où ils permettent la circulation d'un flux d'air sans entrave.

Vous pouvez laisser les piles, mais ouvrez dans ce cas le couvercle de leur compartiment pour y permettre la circulation de l'air.

2. Fermez le couvercle et touchez légèrement le bouton de démarrage situé sur le côté droit de l'appareil. (Figure 5).



Un signal vert s'allume alors juste au-dessus du bouton de démarrage. DryMax s'éteint automatiquement après 8 heures.

Les meilleurs résultats sont constatés au terme d'un cycle complet de 8 heures, mais des périodes aussi courtes que 30 minutes seront utiles.

3. Il est important que le Dry-Brik Mini soit remplacé un mois après sa date d'activation afin d'assurer le plus haut niveau de soin pour vos aides auditives. Jetez l'ancien Dry-Brik Mini dans les ordures ménagères.

À propos du cycle de désinfection UV-C* (modèle DryMax-UV uniquement)

Si votre appareil est équipé d'une lampe désinfectante UV-C (modèle DryMax-UV), une lumière bleue sera visible durant 1-1/2 minutes après le démarrage de l'unité, indiquant que le cycle de désinfection est en cours.

REMARQUE: Toutes les opérations cessent lorsque le couvercle est ouvert, ce qui réinitialise également la minuterie.

La lampe du DryMax-UV tue les germes, les bactéries et les moisissures en émettant une lumière UV-C dans une longueur d'onde germicide (254 nm). De nombreux utilisateurs éprouveront une baisse des démangeaisons réduite et des irritations grâce à cette technologie. Cependant, cet appareil n'est pas un stérilisateur et le fabricant n'apporte aucune garantie quant au degré de destruction bactérienne. Ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie. La lampe UV-C n'affecte pas le cycle de chauffage / séchage.

Utilisation avec un équipement d'implant

Le matériel d'implant doit être maintenu au sec pour fonctionner correctement, et une utilisation régulière de cet appareil élimine l'humidité ambiante et / ou la transpiration. Laissez les piles zinc-air dans le processeur (le cas échéant), mais retirez le couvercle de leur compartiment. Placez le processeur, le casque et le câble dans le compartiment de séchage.

Pour une utilisation avec deux ensembles implantaires, le DryBrik Mini peut être positionné entre les appareils afin de séparer les aimants les uns des autres.

Entretien général du produit

Pour de meilleurs résultats, n'utilisez pas cet appareil dans des endroits très humides tels qu'une salle de bain. Gardez le couvercle fermé à tout moment, car l'efficacité du Dry-Brik Mini sera réduite par une adsorption de l'humidité de l'air ambiant. Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de nettoyeurs puissants ou d'abrasifs. Ne vaporisez aucun liquide dans le plateau ou sur la lampe UV.

Conseils de dépannage

- *Si aucune lumière ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de démarrage:* Le couvercle est-il complètement fermé et le bouton de démarrage a-t-il bien été touché ? Si oui, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché à l'appareil et à une prise électrique, et que cette dernière n'est pas contrôlée par un interrupteur mural qui est en position d'arrêt. Si le produit ne fonctionne toujours pas, remplacez son adaptateur secteur (par un modèle disponible sur le lieu d'achat ou sur www.dryandstore.com). N'utilisez qu'un adaptateur fourni par le fabricant. Si l'unité ne démarre toujours pas, retournez-la auprès de son lieu d'achat pour contrôle et réparation.
- *Si l'unité est bruyante:* Les problèmes de bruit sont généralement liés au ventilateur. Le son résonne à l'intérieur de l'appareil, il faut donc s'attendre à un certain niveau de bruit, même si un ventilateur à roulement à billes de haute qualité est utilisé avec ce produit. Si le bruit du ventilateur varie en termes d'intensité ou de fréquence, retournez l'appareil auprès de son lieu d'achat pour contrôle et réparation.
- *Si l'unité n'accomplit pas correctement ses opérations de séchage:* Le Dry-Brik Mini a-t-il été remplacé régulièrement ? Il est important qu'il soit remplacé tous les mois selon les instructions. Étant donné que cet appareil fonctionne légèrement au-dessus de la température corporelle, lorsque vous placez la paume de votre main sur le dessus du couvercle, vous devriez ressentir une sensation de chaleur dans les 30 minutes suivant le démarrage. Vérifiez également le mouvement du ventilateur en écoutant attentivement ou en appuyant sur le couvercle pour ressentir une très légère vibration.
- *Si aucune lumière bleue n'est visible (modèle DryMax-UV uniquement):* Remarque : La lampe UV-C s'allume immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de démarrage situé sur le couvercle du DryMax-UV, puis reste allumée pendant 90 secondes seulement. Le couvercle doit être complètement fermé pour que la lampe fonctionne, et cette dernière s'éteint lorsque le couvercle est ouvert. Le fonctionnement de la lampe n'affecte pas la température ou la durée du cycle de séchage de 8 heures. Si aucune lumière bleue n'est visible, il est alors nécessaire de faire réparer l'appareil.

Contactez le service clients si ces conseils de dépannage ne résolvent pas votre problème:

En Amérique du Nord, appelez le service clientèle au 1-888-327-1299 ou visitez le site sejourwww.dryandstore.com/help

En dehors de l'Amérique du Nord, contactez le lieu d'achat ou un centre de réparation pour évaluation.

* Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si cela s'applique à votre appareil, ne tenez pas compte des instructions ou commentaires qui se réfèrent aux questions traitant de « germicide », « lumière bleue », « ultraviolet », « UV », « UV-C » ou « lampe ».