

Bedieningsinstructies BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Wanneer u elektrische producten gebruikt, met name wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet u altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen, zoals:

ALLE AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK LEZEN

GEVAAR – Vermijd het risico van elektrocutie:

- Niet gebruiken wanneer u een bad neemt.
- Het product niet plaatsen of bewaren op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Niet in het water zetten of water of andere vloeistof op het apparaat laten vallen.
- Dit apparaat niet vastpakken als het in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING – Voorkom het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel:

- Het apparaat door kinderen of invaliden onder toezicht laten gebruiken.
- Dit apparaat alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld.
- Het product nooit gebruiken als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen. Terugbrengen naar de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of naar een servicecentrum voor controle en reparatie.
- Het product nooit op een zacht oppervlak zetten, zoals een bed. Pluksel en haar verwijderen uit luchtopeningen.
- Niet buitenshuis gebruiken of gebruiken op een plaats waar aerosolproducten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- De wisselstroomadapter die bij de eenheid is inbegrepen, is speciaal voor dit product gemaakt. Niet gebruiken met andere producten, en geen adapter gebruiken van een ander elektronisch apparaat.
- Sommige Dry & Store eenheden gebruiken bacteriedodende ultraviolette straling (UV) voor het schoonmaken. Deze lamp brandt niet wanneer het deksel is geopend. Componenten die aan de UV-straling kunnen worden blootgesteld, niet wijzigen of vervangen.*
- Als de lamp* breekt, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Draag handschoenen wanneer u de glazen deeltjes vervangt. Weggooien conform de milieuvoorschriften.

OPMERKING: Dit product is niet ontworpen om ziekte te diagnosticeren, te voorkomen, te controleren, te behandelen of te verlichten.

Omgevingstemperatuur

Dit product werkt bij een temperatuur van 35° tot 40° C (95° tot 104° F). Dit product werkt correct binnenshuis bij een temperatuur van 18° tot 30° C (65° tot 86° F).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INLEIDING

Dit product is ontworpen voor allerlei soorten gehoorhulpmiddelen, zoals gehoorapparaten, geluidsmaskers, oormonitors en slakkenhuisimplantaten. Bij dagelijks gebruik wordt opgehoopt vocht verwijderd, oorwas gedroogd en de oppervlakken gereinigd die aan de bacteriedodende lamp worden blootgesteld. De meeste slakkenhuisimplantaten klinken klinken; tevens wordt de levensduur van de zink-luchtbatterij verlengd, met name in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad. Met zijn exclusieve Dry-Max™ technologie, Dry & Store verwijdert schadelijke vochtophoping, droogt oorsmeer, en reinigt oppervlakken blootgesteld aan de kiemdodende lamp (indien van toepassing).

Voor het eerste gebruik (Belangrijk)

1. **Activeer het dehydratie-apparaat:** Een wegwerp Dry-Brik, die iedere twee maanden moet worden vervangen, is bijgeleverd. De Dry-Brik heeft drie belangrijke functies: (1) permanent verwijderen van de vochtmoleculen die tijdens de droogcyclus vrijkomen uit de apparaten; (2) relatieve luchtvochtigheid in de doos verlagen tot een niveau dat lager is dan mogelijk is met een verwarmers, waardoor de droogcapaciteit wordt verhoogd; en (3) te vangen geuren.

Verwijder de folie-afdekking om de Dry-Brik te activeren (**Afbeelding 1**). Verwijder de folie niet voordat u de Dry-Brik gaat gebruiken; nadat de folie-afdekking is verwijderd, zal de Dry-Brik beginnen met het absorberen van vocht.



2. **Noteer de activeringsdatum:** Om u te waarschuwen wanneer het is tijd om de Dry-Brik te vervangen, is aan elke Dry-Brik een label bevestigd. Schrijf de datum op waarop de Dry-Brik in gebruik is genomen op deze kaart (**Afbeelding 2**).



OPMERKING: Vervang de Dry-Brik voor de beste resultaten om de twee maanden.



3. **Plaats de geactiveerde Dry-Brik** in de eenheid, zoals in **Afbeelding 3** wordt getoond.



4. **Sluit de wisselstroomadapter aan:** De kleine, ronde plug past in de achterkant van de eenheid (**Afbeelding 4**). Forceer de aansluiting niet, u moet de plug gemakkelijk naar binnen kunnen schuiven. Steek ten slotte de stekker van de wisselstroomadapter in een actief stopcontact.

* Sommige modellen hebben geen bacteriedodende lamp. Als dit het geval is voor uw apparaat, kunt u instructies of opmerkingen die verwijzen naar "bacteriedodend", "blauw licht", "ultraviolet" "UV" of "lamp" negeren.

Aanwijzing voor gebruik

1. Veeg het overtollige vocht en oorsmeer van uw gehoorapparaat voordat u dit in de droogkamer plaatst. Open het deksel en plaats uw gehoorhulpmiddel of implantaat in het grote compartiment aan de rechterkant. U kunt de batterijen er in laten zitten, maar open het batterijvak om luchtcirculatie mogelijk te maken.

2. Sluit het deksel en druk zachtjes op de startknop, die zich op de voorzijde van de eenheid bevindt (Afbeelding 5). Een zwak groen licht, zichtbaar achter de startknop, is gedurende de gehele droogcyclus van 8 uur aanwezig. De beste resultaten krijgt u van een complete 8-uur cyclus, maar perioden van slechts 30 minuten geven ook aanvaardbare resultaten. Alle operaties worden gestopt wanneer het deksel wordt geopend, waardoor de timer wordt gereset.



Als uw eenheid UV-straling gebruikt voor het schoonmaken, dan wordt, na het starten de eenheid, een blauw licht zichtbaar op de bovenzijde van de eenheid; dit licht blijft 1½ minuut branden en geeft aan dat de schoonmaakcyclus is begonnen.

3. Het is belangrijk dat de Dry-Brik twee maanden na de activeringsdatum wordt vervangen voor de beste verzorging van uw hoorhulpmiddelen. Gooi de uitgewerkte Dry-Brik bij het huishoudelijke afval.

Info over de UV*-schoonmaakcyclus

Oorschimmel en gehoorapparaten herbergen ziektekiemen en bacteriën. Sommige modellen hebben een bacteriedodende UV-lamp die dergelijke organismen kan doden en vele gebruikers zullen daarom minder jeuk en irritatie ondervinden. Het schoonmaakeffect is het krachtigst dicht bij de lamp en wordt minder naarmate de afstand groter wordt. Dit product is echter geen sterilisatieapparaat en de fabrikant kan niet garanderen in welke mate de bacteriën worden gedood. Het product is niet ontworpen om ziekte te diagnosticeren, te voorkomen, te controleren, te behandelen of te verlichten. U kunt de UV-lamp verwijderen zonder dat dit invloed heeft op de droogcapaciteiten, omdat de lamp tijdens de verwarmingscyclus niet wordt gebruikt.

Gebruik met implantatie-apparaat

Implantatie-apparaat moet droog blijven voor een goede werking, en regelmatig gebruik van dit product kan vocht verwijderen, dat zich heeft opgehoopt uit de omgeving en/of perspiratie. Sommige gebruikers merken wellicht een aanmerkelijk verschil in de levensduur van de zink-luchtbatterij, met name bij heet en vochtig weer. De resultaten zijn voor elke persoon verschillend. Hier volgt een aantal specifieke suggesties:

- **Spraakprocessors achter het oor:** Laat zink-lucht-batterijen in de processor zitten (waar van toepassing) maar verwijder de batterij-afdekking. Plaats de processor, het hoofdgedeelte en de kabel in het droogcompartiment aan de rechterkant. Plaats alleen het droogmiddel en niets anders in de lade aan de linkerkant.
- **Spraakprocessors die op het lichaam worden gedragen:** Plaats zo veel mogelijk onderdelen in het droogcompartiment zonder ze dicht op elkaar te drukken, om te voorkomen dat de luchtstroom wordt geblokkeerd. Vanwege de beperkte ruimte moet de processor wellicht apart van de andere hardware worden onderhouden. Als dit het geval is, moet de microfoon vaker dan de processor worden onderhouden omdat die gevoeliger is en meer schade door vocht kan oplopen. Uit sommige processors moet u wellicht het batterijpak verwijderen, omdat de totale grootte te groot is voor het droogcompartiment.

Algemene productzorg

Voor de beste resultaten, mag het apparaat niet werken in een hoge luchtvochtigheid locaties, zoals een badkamer. Laat het deksel altijd gesloten omdat de doelmatigheid van het droogmiddel afneemt door absorptie van vocht uit lucht in de omgeving. Reinigen met een zachte doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Geen vloeistof op de lade of op de UV-lamp spuiten.

Problemen opsporen en oplossen

- *Er gaat geen lampje branden na indrukken van de startknop:* Is de deksel goed gesloten en/of is de startknop ingedrukt? Zo ja, controleer dat de wisselstroomadapter goed aangesloten is op het product en op het elektriciteitsnet. Controleer tevens of het elektriciteitsnet wordt bediend via een wandschakelaar die uit staat. Probeer vervolgens een andere wisselstroomadapter (verkrijgbaar bij de winkel waar het product is aangeschaft of bij een servicecentrum of via www.dryandstore.com. Als de eenheid nog steeds niet werkt, is de oorzaak zeer waarschijnlijk van technische aard. In dat geval kunt u zich het beste wenden tot de winkel waar de eenheid is aangeschaft.
- *Eenheid is luidruchtig:* Lawaai wordt meestal veroorzaakt door de ventilator. Het geluid resonanceert in de eenheid, dus kunt u wat lawaai verwachten, zelfs met een ventilator hoge kwaliteit met bal die in het product wordt gebruikt. Als het lawaai van de ventilator varieert in intensiteit en frequentie, haalt u de stekker uit het stopcontact en controleert u of het apparaat niet is verstopt. Als u niets kunt vinden, laat u onderhoud aan de eenheid uitvoeren.
- *Eenheid droogt niet goed:* Is de Dry-Brik regelmatig vervangen? Het is belangrijk dat deze iedere twee maanden volgens de instructies wordt vervangen. Controleer of de ventilator beweegt. Als u geen ventilatorgeluid kunt horen, breng de unit dan terug naar de plaats van aankoop of naar een service center voor evaluatie.

Voor eenheden met een UV-lamp*:

- *Er is geen blauw licht (maar het groene lampje brandt wel) zichtbaar tijdens de eerste 1½ minuten van de werkcyclus:* Controleer of de UV-lamp goed in het voetstuk zit. Zo niet, verwijder dan de lamp en plaats deze op de juiste wijze. Herstart de eenheid met het deksel goed gesloten. Vervang de UV-lamp als het blauwe licht niet zichtbaar wordt tijdens de eerste 1½ minuut. (De lamp is verkrijgbaar bij de winkel waar u deze hebt aangeschaft of bij een servicecentrum of via www.dryandstore.com.) Vervang de UV-lamp alleen door een bij de fabrikant verkrijgbare lamp. Als zowel het groene en het blauwe lampje niet branden, kunt u de bovenstaande aanwijzingen volgen onder "Er gaat geen lampje branden...".
- *Metalen kraaltjes in de UV-lamp:* in de buizen van de lampen van sommige fabrikanten bevinden zich een metalen kraaltje; dit is volledig normaal. Dit is het resultaat van een milieubewuste fabricageproces.

Als geen van de bovenstaande acties het probleem oplost:
In Noord-Amerika, bel de klantenservice op 1-888-327-1299 of bezoek www.dryandstore.com

Buiten Noord-Amerika, neem contact op met de plaats van aankoop of een service center voor evaluatie.

* Sommige modellen hebben geen bacteriedodende lamp. Als dit het geval is voor uw apparaat, kunt u instructies of opmerkingen die verwijzen naar "bacteriedodend", "blauw licht", "ultraviolet" "UV" of "lamp" negeren.