

DRY & STORE®

Ekspluatacinės Instrukcijos SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui namų ūkyje. Kai naudojate elektros prietaisus, ypatingai kai yra vaikų visada turite laikytis pagrindinių atsargos priemonių, tame tarpe:

PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

PAVOJUS – žūties nuo elektros srovės rizikos sumažinimui:

- Nenaudokite kai maudotės.
- Nepadėkite ir nelaikykite prietaiso tose vietose nuo kurių jis gali nukristi į vonią ar kriauklę.
- Nėpanardinkite ir neleiskite vandeniui arba kitokiam skysčiui varvėti ant jo.
- Neliukite šio prietaiso, jeigu jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite šakutę.

ĮSPĖJIMAS – nusidėginimų, žūties nuo elektros srovės, gaisro arba asmenų sužalojimo rizikai sumažinti:

- Atidžiai stebėkite kai naudoja vaikai arba neįgalūs asmenys – kai naudoja patys arba naudojant šalia jų.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį kaip parašyta vadove.
- Niekada neeksploatuokite prietaiso jeigu laidas arba kištukas yra sugadinti, tinkamai neveikia, prietaisas buvo numestas, arba sugadintas, arba įmestas į vandenį. Sugrąžinkite jį į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą patikrinimui ir pataisymui.
- Niekada nepadėkite prietaiso ant minkšto paviršiaus, tokio kaip minkštasuolis arba lova. Saugokite, kad į oro angą nepatektų pūkėliai, plaukai ir panašūs elementai.
- Nenaudokite lauke ir neeksploatuokite tose vietose kur naudojami aerozolių (purškalo) produktai arba kur skiriamas deguonis.
- AC adapteris yra komplektuojamas su šiuo įrengimu ir yra specialiai pagamintas šiam prietaisui. Nenaudokite su kitais prietaisais ir nenaudokite jokio kito elektrinio prietaiso adapterio vietoje suteikiamo.
- Kai kuriuose Dry & Store gaminiuose valymui naudojama baktericidinė ultravioletinė (UV) šviesa. Kai dangtelis pakeltas, šviesa nebus sklaidžiama. Nekeiskite ir nepašalinkite sudedamųjų dalių, dėl ko gali atsirasti UV apšvita.*
- Jei lempa* suskyla, iškart išjunkite. Išimdami stiklo šukes mūvėkite pirštines. Šalinkite laikydamiesi nustatytos tvarkos.

PASTABA. Šis gaminys nėra skirtas ligai diagnozuoti, nuo jos apsaugoti, jai stebėti, gydyti arba malšinti.

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Šio prietaiso veikimo temperatūros ribos yra nuo 35° iki 40° C (nuo 95° iki 104° F). Šis prietaisas tinkamai veiks vidaus aplinkos temperatūroje nuo 18° iki 30° C (nuo 65° iki 86° F).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Įvadas

Šis gaminys yra skirtas visų tipų klausos instrumentams, įskaitant klausos aparatus, triukšmo slopinimo priemones, monitorines ausines ir implantuojamas priemones. Kasdien naudojamas gali pagerinti klausos priemonių garso funkcijas, pratęsti jų naudojimo laiką ir užtikrinti jų patikimesnį veikimą. itin drėgnomis sąlygomis gali pratęsti cinko-oro elemento naudojimo laiką. Pasitelkiant išskirtinę Dry-Max™ technologiją, Dry & Store šalina kenksmingą susikaupusią drėgmę, džiovinina ausies sierą ir sanitariskai apdoroja paviršius, kuriuos veikia baktericidinė lempa (jei yra).

Prieš naudojant pirmą kartą (Svarbu)

1. Sausiklio aktyvinimas: Pridedamas vienkartinio naudojimo Dry-Brik, kurį reikia keisti kas du mėnesius. Dry-Brik atlieka tris svarbias funkcijas: (1) nuolat šalina drėgmės molekules, išskiriamas iš prietaisų džiovinimo ciklo metu; (2) generuoja daug mažesnį santykinį oro drėgnį dėžutės viduje, nei tai įmanoma naudojant tik šildiklį, tokiu būdu maksimaliai padidinant džiovinimo gebą; (3) šalina kvapus.

Norėdami suaktyvinti Dry-Brik, pašalinkite folinę plėvelę (1 pav.). Nenuimkite folinės plėvelės, kol nebūsime pasiruošę naudoti Dry Brik, nes ją pašalinus, Dry Brik pradės įgerti drėgmę.




2. Užrašykite datą, kada pradėsite naudoti. Siekiant priminti, kada reikia keisti, prie kiekvieno Dry-Brik pridama kortelė. Toje kortelėje užrašykite datą, kada Dry-Brik buvo pradėtas naudoti. (2 pav.).



PASTABA. Jei norite užtikrinti geriausią jo veikimą, keiskite Dry Brik kas 2 mėnesius.




3. Įdėkite suaktyvintą Dry-Brik į savo prietaisą, kaip parodyta 3 pav.

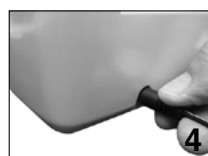

4. Prijunkite kintamosios srovės siejklį. Mažas apvalus kištukas įstatomas į prietaiso užpakalinę dalį (4 pav.). Nekiškite per jėgą; ji turėtų įsistatyti gana lengvai. Galiausiai, įjunkite kintamosios srovės siejklį į veikiančią elektros lizdą.

* Kai kurie modeliai yra be baktericidinių lempų. Jei tai taikytina jūsų įtaisui, nepaisykite bet kokių nurodymų ar pastabų, kur minima: "baktericidinė", "mėlynoji šviesa", "ultravioletinė", "UV" ar "lempa".

Naudojimo instrukcija

1. Nuvalykite drėgmės perteklių ir ausų sierą nuo klausos aparatų įdėkite juos į džiovinimo kamerą. Atidarykite dangtelį ir įdėkite klausos instrumentus arba implantų techninę įrangą dideliame skyriuje dešinėje. Baterijas galite palikti viduje, bet atidarykite baterijos dangtelį ir leiskite cirkuliuoti orui.
2. Uždarykite dangtelį ir paspauskite Start (paleisti) mygtuką, esantį prietaiso priekyje (5 pav.). Žalia šviesa, sklindanti iš Start mygtuko, bus matoma viso džiovinimo ciklo metu, tai yra maždaug 8 valandas. Visas 8 valandų ciklas užtikrina geriausius rezultatus, tačiau net ir 30 minučių ciklai bus naudingi. Visos prietaiso procedūros yra sustabdomos, kai dangtelis yra atidaromas; tai perstato laikmatį.


Jei jūsų prietaise yra UV higieninė lempa, įjungus prietaisą 1½ minutės prietaiso viršuje bus matoma mėlyna šviesa; tai rodo, kad valymo ciklas yra veikiantis.
3. Svarbu, kad Dry-Brik būtų pakeistas po dviejų mėnesių nuo jo suaktyvinimo datos, siekiant užtikrinti jūsų klausos instrumentų aukščiausio lygio priežiūrą. Iškvotą Dry-Brik šalinkite su buitinėmis atliekomis.

Apie UV sterilizavimo ciklą*

Klausos aparatuose ir klausos instrumentuose kaupiasi mikrobai ir bakterijos. Kai kuriuose modeliuose yra baktericidinė UV lempa, naikinti tokius mikroorganizmus, dėl to daug naudotojų jaus mažesnę niežėjimą ir dirginimą. Sterilizavimo poveikis stipriausias arčiau lempos; su atstumu jis mažėja. Tačiau šis prietaisas nėra sterilizatorius, ir gamintojas nedaro jokių pareiškimų dėl bakterijų naikinimo laipsnio. Jis nėra skirtas diagnozuoti ligą, nuo jos apsaugoti, ją stebėti, gydyti arba malšinti. UV lempą galima išimti, neįtakojant džiovinimo gebos; ji nėra kaitinimo ciklo dalis.

Naudokite su implantuojamomis priemonėmis

Kad tinkamai veiktų, implantų techninė įranga turi būti laikoma sausai, todėl reguliariai naudojant šį prietaisą galima pašalinti drėgmę, besikaupiančią iš aplinkos ir (arba) dėl prakaitavimo. Kai kurie naudotojai gali pastebėti, kad cinko-oro elemento naudojimo trukmė yra ilgesnė, ypač karšto ir drėgno oro sąlygomis. Individualūs rezultatai gali įvairuoti. Pateikiame kelis tikslus pasiūlymus:

- **Už ausies patalpinami kalbos procesoriai:** Palikite cinko-oro baterijas procesoriuje (kai tai taikoma), bet nuimkite baterijos dangtelį. Patalpinkite procesorių, laikiklį ir laidą į džiovinimo skyrių dešinėje. Nedėkite nieko išskyrus desikantą kairėje dėklo pusėje.
- **Ant kūno dėvimi kalbos procesoriai:** Į džiovinimo kamerą dėkite tiek sudedamųjų dalių, kiek jų galėtų tilpti per daug nesugrūdus, kad oro srovė galėtų nevaržomai cirkuliuoti. Dydžio apribojimas gali reikšti, kad procesorius turės būti apdorojamas atskirai nuo techninės įrangos. Tokiu atveju mikrofono sąranka turėtų būti apdorojama dažniau nei procesorius, kadangi jis labiau pažeidžiamas drėgmės. Iš kai kurių procesorių gali prireikti išimti elemento pakuotę, jei jie kartu netelpa į džiovinimo kamerą.

Bendra prietaiso priežiūra

Norėdami, kad šis prietaisas optimaliai veiktų, nenaudokite jo itin drėgnose vietose, tokiose kaip vonios kambarys. Laikykite dangtelį uždarytą visą laiką, kadangi sausiklio veiksmingumą gali sumažinti iš aplinkos sugerama drėgmė. Valykite sausa šluoste. Niekada nenaudokite valiklių ar švitrinimo priemonių. Nepurškite jokio skysčio į dėklą ar ant UV lempos.

Trikčių diagnostika

- *Paspaudus Start mygtuką, neišsižiebta šviesa:* Ar dangtelis sandariai uždarytas, ir Start mygtukas buvo paspaustas? Jei taip, patikrinkite, kad kintamosios srovės siejklis būtų patikimai prijungtas prie prietaiso ir įjungtas į lizdą (maitinimo tinklą), ir ar lizdas (maitinimo tinklas) nėra kontroliuojamas sieniniu jungikliu, kuris gali būti išjungtas. Paskui Išmėginkite kitą AC adapterį (kurį galima įsigyti pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba www.dryandstore.com). Pakeiskite tik gamintojo suteikiamu adapterius. Jei prietaiso vis tiek negalima įjungti, galbūt vidinė elektroninė įranga yra sugedusi; tada gražinkite jį įvertinti ten, kur pirkote, ar į aptarnavimo centrą.
- *Įrenginys kelia pašalinį garsą:* Pašalinio garso problemos yra įprastai susijusios su ventiliatoriumi. Prietaiso viduje girdisi garsas; normalu, kai prietaisas skleidžia šiek tiek garso, net ir iš aukštos kokybės sukamo guolinio feno, kuris naudojamas šiame gaminyje. Jeigu ventiliatoriaus triukšmo intensyvumas arba dažnis įvairuoja, atjunkite įrengimą iš elektros ir patikrinkite kliūtis. Jeigu nėra, pateikite įrengimą aptarnavimui.
- *Prietaisas nedžiovina tinkamai:* Ar Dry Brik buvo reguliariai keičiamas? Svarbu, kad jis būtų pakeičiamas pagal instrukcijas. Jeigu visiškai negirdite garso, sugražinkite įrengimą įvertinimui į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą.

Vienetai, UV lempos:

- *Nesimato mėlynos šviesos per pirmąsias veikimo ciklo 1½ minutės, tačiau dega žalia šviesa.* Patikrinkite, kad UV lempa būtų tvirtai įstatyta patrone. Jie ne, Išimkite ir Iš naujo patalpinkite lemputę, tada iš naujo paleiskite įrangą su sandariai uždarytu dangteliu. Jei per pirmąsias 1½ veikimo ciklo minutes nesimato mėlynos spalvos šviesos, pakeiskite UV lempą (kurią galima įsigyti pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba www.dryandstore.com). Pakeiskite tik gamintojo suteikiama specialia lempa. Jei abi mėlyna ir žalia lemputės neužsidega, aukščiau žr. "Neužsidega nei viena lemputė...".
- *Metalo granulės UV lemposje:* Tai priklauso nuo lempos gamintojo; kai kurių lempų vamzdelių viduje yra metalo granulė, ir tai visiškai normalu. Tai yra aplinkai jautraus gamybos proceso rezultatas.

Jeigu nei vienas iš nurodytųjų punktų neišsprendžia jūsų problemas:

Šiaurės Amerikoje, skambinkite Klientų aptarnavimo tarnybai telefonu: 1-888-327-1299 arba apsilankykite www.dryandstore.com

Už Šiaurės Amerikos ribų įvertinimui, susisiekite su vieta, kurioje pirkote arba aptarnavimo centru.

* Kai kurie modeliai yra be baktericidinių lempų. Jei tai taikytina jūsų įtaisui, nepaisykite bet kokių nurodymų ar pastabų, kur minima: "baktericidinė", "mėlynoji šviesa", "ultravioletinė", "UV" ar "lempa".