

Generell Bruksanvisning

VIKTIGE ADVARSLER

Dette produktet er til bruk i husholdningen. Det skal alltid, spesielt når barn er til stede, tas grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av elektriske artikler, deriblant:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

FARE – for å redusere risikoen for dødelige elektriske støt:

- Skal ikke brukes under bading.
- Ikke plassér eller oppbevar produktet et sted hvor det er i fare for falle eller dyttes ned i vaskeservant eller badekar.
- Må ikke settes oppi eller mistes ned i vann eller annen væske.
- Ikke ta i dette utstyret hvis det har falt ned i vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for forbrenning, dødelige elektriske støt, brann eller skade på personer:

- Må overvåkes nøye når det benyttes av, på eller i nærheten av barn eller uføre.
- Dette apparatet må bare brukes i overensstemmelse men den beregnede bruk, slik det er beskrevet denne manualen.
- Dette produktet må ikke brukes hvis ledningen eller pluggen er ødelagt eller ikke fungerer normalt, hvis det har falt i bakken eller blitt ødelagt eller blitt sluppet i vannet. Det skal leveres tilbake til kjøpsstedet eller servicekontoret for å bli undersøkt og reparert.
- Apparatet skal ikke settes på et mykt underlag som en seng eller sofa. Pass på at det ikke kommer lo, hår eller lignende inn i luftåpninger.
- Skal ikke brukes utendørs eller benyttes der hvor aerosol (spray-)produkter er i bruk eller der det brukes oksygen.
- Likestrømsadapteren som følger med enheten er produsert spesielt for dette apparatet. Denne må ikke benyttes sammen med annet utstyr og det må ikke benyttes adapter fra et annet elektrisk apparat som erstatning.
- Enkelte Dry & Store-enheter rengjør med bakteriedrepende ultrafiolett lys (UV). Dette lyset er slukket når lokket er åpent. Ingen komponenter må endres eller overstyres slik at utilsiktet belysning med UV lys kan forekomme.*
- Hvis lampen* blir knust, må støpselet straks trekkes ut. Benytt hansker når glasskår fjernes. Avhend på forsvarlig måte.

MERK – Dette produktet er ikke utformet for å kunne diagnostisere, forhindre, overvåke, behandle eller lindre sykdom.

DRIFTSBETINGELSER

Driftstemperaturen for dette apparatet er 35° til 40 °C (95° til 104 °F). Dette apparatet fungerer riktig ved en omgivelsestemperatur på 18° til 30 °C (65° til 86 °F) innendørs.

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Innledning

Dette produktet er utformet for alle slags hørselsinstrumenter, deriblant hørselshjelpemidler, støymaskering, øremonitører og implantasjonsutstyr. Daglig bruk kan hjelpe de fleste hørselsinstrumenter til å gi bedre lyd, vare lengre og yte med en større grad av pålitelighet, og under meget fuktige forhold kan sink-luft-batterier oppnå lengre levetid. Den eksklusive Dry-Max™-teknologien gjør Dry & Store i stand til å fjerne skadelig oppsamling av fuktighet, tørke ørevoks og rense overflater som belyses med den bakteriedrepende lampen (der denne anvendes).

Før førstegangs bruk (viktig)

1. **Aktivering av dessikatoren:** En Dry-Brik til engangsbruk, som skal skiftes ut hver annen måned, følger med. Dry-Brik har tre viktige funksjoner: (1) å fjerne fuktighetsmolekylene som frigjøres fra enhetene under tørkesyklus permanent; (2) å senke den relative fuktigheten inne i boksen til et langt lavere nivå enn hva som er mulig med bare et varmeapparat og derved maksimere tørkekapasiteten og (3) å suge opp lukter.

Fjern foliebelegget (**figur 1**) for å aktivere Dry-Brik. Ikke fjern folien før du er klar til å bruke Dry Brik, fordi straks folien er fjernet, vil Dry Brik begynne å absorbere fuktighet.



2. **Noter aktiveringsdatoen:** For å minne deg om når det er på tide med utskifting er det festet et kort til hver Dry Brik. Skriv ned datoen når du tar i bruk Dry-Brik på kortet. (**Figur 2**).




MERK: Skift Dry Brik annenhver måned for å sikre maksimal ytelse.

3. **Plasser den aktiverte Dry Brik i enheten som vist i figur 3.**



4. **Kople til vekselstrømadapteren:** Den lille, runde pluggen passer på baksiden av enheten (**figur 4**). Ikke bruk makt, den skal være lett å føre inn. Sett til slutt vekselstrømadapteren inn i en strømførende stikkontakt.

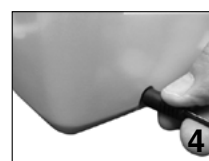

* Enkelte modeller inneholder ikke en bakteriedrepende lampe. Hvis dette gjelder apparatet ditt, kan du hoppe over alle instruksjoner eller kommentarer som viser til «bakteriedrepende,» «blått lys,» «ultrafiolett,» «UV» eller «lampe.»

Bruksanvisning

1. Tørk av fuktighet og ørevoks fra høreapparatet før de settes inn i tørkekammeret. Åpne lokket og legg høreapparatet eller implantat-utstyret i det store rommet til høyre. Batteriene kan stå i men batterilokket bør åpnes slik at luften får sirkulere.
2. Lukk lokket og trykk startknappen foran på enheten forsiktig ned (**figur 5**). Bak startknappen vil en grønn glød kunne sees under hele tørkesyklusen, omtrent 8 timer. Resultatet blir best ved å gjennomføre hele syklusen på 8 timer, men selv så lite som 30 minutter er gunstig. Alle funksjoner opphører når lokket åpnes, inkludert tilbakestilling av tidtakeren.



Hvis enheten har en bakteriedrepende UV-lampe, vil et blått lys kunne sees øverst på enheten i 1½ minutt etter at enheten er startet for å vise at den bakteriedrepende syklusen fungerer.

3. Det er viktig å skifte Dry-Brik to måneder etter aktiveringsdatoen for å sikre best mulig pleie av hørselsinstrumentene dine. Brukt Dry-Brik kan kastes sammen med husholdningsavfall.

Om UV rensesyklusen*

Øreformer og hørselsinstrumenter skjuler mikroorganismer og bakterier. Enkelte modeller er utstyrt med en bakteriedrepende UV-lampe som dreper slike organismer, og mange brukere vil oppleve mindre kløe og irritasjon som et resultat. Rengjøringseffekten er sterkest like ved lampen og avtar med avstand. Dette apparatet er imidlertid ingen sterilisator, og produsenten gir ingen tilsagn om graden av bakteriereduksjon. Apparatet er ikke konstruert for å diagnostisere, forhindre, overvåke, behandle eller lindre sykdom. UV-lampen er ikke en del av oppvarmingscyklusen og kan fjernes uten at det går ut over tørkeevnen.

Bruk med implantasjonsutstyr

Implantater må oppbevares tørt for å fungere riktig, og regelmessig bruk av dette apparatet kan eliminere fuktighet som akkumuleres fra omgivelsene og/eller svette. Enkelte brukere kan oppleve at levetiden for sink-luft-batterier øker, særlig under fuktige værforhold. Individuelle resultater varierer. Her er noen spesielle forslag:

- **Taleprosessorer plassert bak øret:** La sink-luft batteriene sitte i (når dette er mulig), men ta vekk batterilokket. Legg prosessoren, hodebøylen og kabelen i tørkekammeret til høyre. La det ikke være noe annet enn tørkebrikken i venstre side av brettet.
- **Taleprosessorer som bæres på kroppen:** Legg så mange komponenter i tørkekammeret som det er plass til uten at det blir trangt, slik at luften kan strøme fritt. På grunn av størrelsen må kanskje prosessoren behandles atskilt fra resten av utstyret. I så fall må mikrofonkomponenten, som er mer utsatt for fuktskader, behandles oftere enn prosessoren. Batteripakken må kanskje fjernes fra enkelte prosessorer hvis den totale størrelsen er for stor for tørkekammeret.

Behandling av utstyret

For å oppnå best mulig virkning må dette apparatet ikke brukes i rom med høy fuktighet, som f.eks. badetrom. Hold lokket stengt til enhver tid siden tørkebrikken blir mindre effektiv ved absorpsjon av fuktighet fra luften i omgivelsene. Rengjør apparatet med en myk klut. Bruk aldri kraftige vaskemidler eller skuremidler. Sprut ikke væske inn på brettet eller på UV-lampen.

Feilsøking

- **Ingen lamper lyser når startknappen trykkes:** Er lokket godt lukket og startknappen trykket inn? Hvis ja, kontroller at vekselstrømadapteren er koplet ordentlig til både apparatet og stikkkontakten samt at veggkontakten ikke styres av en veggbryter som er slått av. Hvis ikke dette hjelper, forsøk en annen vekselstrømsadapter (kan fås der hvor enheten ble kjøpt, et servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal kun erstattes med en adapter som er levert av produsenten. Hvis enheten fortsatt ikke starter, kan det være feil i elektronikken, og da må enheten leveres tilbake til utsalgsstedet eller til et servicesenter for kontroll.
- **Det kommer støy fra enheten:** Støyproblemer har vanligvis å gjøre med viften. Lyden gir gjenlyd inne i enheten slik at noe støy er å forvente, selv om det brukes en vifte av høy kvalitet med kulelager i dette produktet. Hvis viftestøyen varierer i intensitet eller frekvens kan viften koples fra strømkilden og undersøkes med hensyn på mulige forstyrrelser. Hvis det ikke kan finnes noe må enheten leveres til service.
- **Enheten tørker ikke skikkelig:** Er Dry Brik blitt skiftet regelmessig? Det er viktig at denne skiftes ut i henhold til bruksanvisningen. Hvis det ikke høres viftelyd skal enheten leveres tilbake til utsalgsstedet eller et servicesenter for å bli vurdert.

For enheter som inkluderer en UV lampe:

- **Det blå lyset er ikke synlig i det første 1½ minuttet av driftssyklusen, men det grønne lyset er på:** Kontroller at UV-lampen sitter godt fast i sokkelen. Hvis ikke skal den tas ut og settes in på nytt, deretter startes enheten på nytt med lokket satt tett på. Hvis det blå lyset ikke tennes i løpet av de første 1½ minuttene skal UV-lampen skiftes (kan fås på utsalgsstedet, ved et servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal kun erstattes med den spesielle lampen som produsenten leverer. Hvis verken det blå eller det grønne lyset virker, se avsnittet "Ingen lamper tennes..." ovenfor.
- **Metallbånd inne i UV-lampen:** Avhengig av lampeprodusenten kan enkelte lamper ha et metallbånd inne i røret, noe som er helt normalt. Det kommer av den miljøvennlige produksjonsprosessen.

Dersom problemet ikke kan løses ved hjelp av det ovenstående:

I Nord-Amerika, ring til Kundetjenesten på 1-888-327-1299 eller gå inn på www.dryandstore.com

Utenfor Nord-Amerika skal utsalgsstedet eller et servicesenter kontaktes for at en vurdering skal kunne gjøres.

* Enkelte modeller inneholder ikke en bakteriedrepende lampe. Hvis dette gjelder apparatet ditt, kan du hoppe over alle instruksjoner eller kommentarer som viser til «bakteriedrepende,» «blått lys,» «ultrafiolett,» «UV» eller «lampe.»