

# DRY & STORE®

## Uputstvo za rukovanje

### VAŽNE BEZBEDNOSNE MERE

Ovaj proizvod je namenjen samo za kućnu upotrebu. Pri upotrebi električnih proizvoda, naročito u prisustvu dece, uvek se morate pridržavati osnovnih bezbednosnih mera:

#### PRE UPOTREBE PROČITAJTE SVA UPUTSTVA

**OPASNOST** – da bi se smanjio rizik od strujnog udara:

- Proizvod nemojte da koristite dok se kupate.
- Proizvod nemojte stavljati ili čuvati na mestu sa koga može pasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik.
- Proizvod nemojte stavljati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ako uređaj upadne u vodu, nemojte pokušavati da ga dohvatite rukom. Odmah ga isključite iz napajanja.

**UPOZORENJE** – da bi se smanjio rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede osoba:

- Neophodan je strog nadzor kada uređaj koriste deca ili invalidi ili se uređaj koristi na njima ili u njihovoj blizini.
- Proizvod koristite isključivo za njegovu namenu opisanu u ovom priručniku.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti ovaj proizvod ako mu je oštećen kabl ili utikač, ako ne radi ispravno, ako ste ga ispustili ili oštetili ili ako je upao u vodu. Vratite ga u prodavnicu u kojoj ste ga kupili ili servisni centar radi pregleda i popravke.
- Nikada nemojte stavljati uređaj na meku površinu kao što je krevet. Na otvorima za vazduh ne sme biti vlakana, dlaka i sl.

Nemojte koristiti napolju, kao ni u sredini u kojoj se koriste aerosoli (sprejevi) ili u kojoj se primenjuje kiseonik.

- AC adapter (adapter za naizmeničnu struju) koji ste dobili uz uređaj napravljen je posebno za ovaj proizvod. Ovaj adapter nemojte koristiti sa nekim drugim uređajem i nemojte umesto njega koristiti adapter nekog drugog električnog uređaja.
- Neki uređaji Dry & Store koriste germicidno ultraljubičasto svetlo (UV) za dezinfekciju. Uređaj neće odavati to svetlo dok je poklopac otvoren. Nemojte vršiti izmene niti narušavati rad bilo kog dela koji može dovesti do izlaganja UV svetlu.\*
- Ako se lampa\* razbije, odmah isključite uređaj iz napajanja. Nosite rukavice prilikom uklanjanja delića stakla. Odložite na otpad na odgovarajući način.

**NAPOMENA** – ovaj proizvod nije namenjen za dijagnostiku, prevenciju, praćenje, lečenje i ublažavanje bolesti.

#### RADNI USLOVI

Radni temperaturni opseg ovog uređaja kreće se od 35 °C do 40 °C (95 °F do 104 °F). Za ispravan rad ovog uređaja potrebno je da temperatura u prostoriji bude od 18 °C do 30 °C (65 °F do 86 °F).

### SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

#### Uvod

Ovaj proizvod je namenjen za sve tipove slušnih instrumenata, uključujući slušna pomagala, uređaje za maskiranje šuma, ušne monitore i opremu za implantate. Njegovom svakodnevnom upotrebom većina slušnih instrumenata će bolje zvučati, duže trajati i raditi sa većom pouzdanošću, a cink-vazdušne baterije mogu duže trajati u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Svojom posebnom Dry-Max™ tehnologijom, Dry & Store uklanja štetnu nakupljenu vlagu, suši ušnu mast i dezinfikuje površine izložene svetlu germicidne lampe (kod uređaja koji imaju lampu).

#### Pre prve upotrebe (važno)

1. **Aktivirajte desikant:** Sa uređajem ćete dobiti Dry-Brik za jednokratnu upotrebu koji se mora zameniti svaka dva meseca. Dry-Brik obavlja tri važne uloge: (1) trajno uklanja molekule vlage koje ispuštaju uređaji tokom ciklusa sušenja; (2) snižava relativnu vlažnost u kutiji do mnogo nižeg nivoa od onog koji se može postići samo grejačem, čime se maksimalno pospešuje sposobnost sušenja i (3) upija neprijatne mirise.

Da biste aktivirali Dry-Brik, skinite zaštitnu foliju (Slika 1). Nemojte skidati foliju sve dok ne budete spremni da koristite Dry-Brik, jer čim je skinete Dry-Brik će početi da upija vlagu.


2. **Zapišite datum aktivacije:** Na svaki Dry-Brik je prikazana kartica kako biste znali kada treba da ga zamenite. Na karticu zapišite datum kada ste počeli da koristite Dry-Brik (Slika 2).

**NAPOMENA:** Da biste osigurali maksimalni učinak, Dry-Brik zamenite svaka 2 meseca.

3. **Ubacite aktivirani Dry Brik** u uređaj na način prikazan na Slici 3.
4. **Priključite AC adapter:** Mali kružni utikač se priključuje na zadnjoj strani uređaja (Slika 4). Nemojte priključivati na silu; utikač bi trebalo lako da uđe. Na kraju utaknite AC adapter u aktivnu strujnu utičnicu.

#### Uputstvo za upotrebu

1. Избришите влагу и ушну маст са слушног помагала пре него избришите влагу и ушну маст са слушног помагала пре него што га убаците у комору за сушење. Отворите poklopac

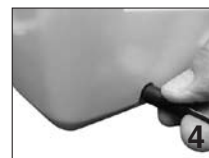

\* Neki uređaji nemaju germicidnu lampu. Ako je ni vaš uređaj nema, zanemarite sva uputstva ili komentare koji se odnose na „germicidno“, „plavo svetlo“, „ultraljubičasto“, „UV“ i „lampu“.

i stavite slušne instrumente ili opremu za implantate u veliki, desni odeljak. Možete da ostavite baterije unutra, ali otvorite poklopac odeljka za baterije da bi cirkulisao vazduh.

2. Zatvorite poklopac i lagano pritisnite dugme za početak koje se nalazi na prednjoj strani uređaja (**Slika 5**). Tokom čitavog ciklusa sušenja, koji iznosi oko 8 časova, iza dugmeta za početak svetleće zeleno svetlo. Najbolji rezultati se postižu celim 8-časovnim ciklusom, ali će od koristi biti i periodi od najmanje 30 minuta. Kada otvorite poklopac sve radnje se prekidaju i merač vremena se vraća na početak.

Ako vaš uređaj ima UV lampu za dezinfekciju, kada pokrenete uređaj na gornjoj strani uređaja 1½ minut će svetleti plavo svetlo, označavajući da je u toku ciklus dezinfekcije.

3. Kako bi se obezbedio najviši nivo nege za vaše slušne instrumente, veoma je važno da Dry-Brik zamenite dva meseca od datuma aktivacije. Istrošeni Dry-Brik odložite sa kućnim smećem.

## O ciklusu UV dezinfekcije\*

U ušnim kalupima i slušnim instrumentima se stvaraju klice i bakterije. Neki modeli imaju germicidnu UV lampu koja uništava te organizme, što će kod mnogih korisnika dovesti do smanjenja svraba i iritacije. Dezinfekciono dejstvo se smanjuje sa udaljenošću od lampe tako da je ono najjače pored lampe. Ipak, ovaj uređaj nije sterilizator i proizvođač ne pruža nikakve garancije u pogledu stepena uništavanja bakterija. Uređaj nije namenjen za dijagnostiku, prevenciju, praćenje, lečenje i ublažavanje bolesti. UV lampa se može ukloniti bez uticaja na sposobnost sušenja pošto ona ne učestvuje u ciklusu zagrevanja.

## Upotreba sa opremom za implantate

Oprema za implantate se mora održavati suvom kako bi ispravno radila, a redovnom upotrebom ovog uređaja može se eliminisati vlaga koja se nakupila iz okoline i/ili znojenjem. Neki korisnici će možda primetiti da im cink-vazdušne baterije traju duže, naročito pri toplim i vlažnim vremenskim uslovima. Rezultati se razlikuju od pojedinca do pojedinca. Evo nekih konkretnih predloga:

- **Procesori zvuka koji se nose iza uva:** Ostavite cink-vazdušne baterije u procesoru (gde je primenljivo), ali skinite poklopac odeljka za baterije. Stavite procesor, slušalicu i kabl u odeljak za sušenje na desnoj strani. U levi odeljak nemojte stavljati ništa osim desikanta.
- **Procesori zvuka koji se nose na telu:** U odeljak za sušenje stavite onoliko delova koliko može da stane a da ne bude pretrpano, kako bi se obezbedilo nesmetano strujanje vazduha. Ograničenja u veličini mogu zahtevati da se procesor obrađuje odvojeno od ostale opreme. U tom slučaju, sklop mikrofona treba obrađivati češće nego procesor pošto je podložniji oštećenju usled vlage. Iz nekih procesora će možda biti potrebno da se izvadi pakovanje baterija, ako je veličina procesora zajedno sa pakovanjem baterija prevelika za odeljak za sušenje.

## Opšti saveti za negu proizvoda

Radi postizanja najboljih rezultata, nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama sa velikom vlažnošću poput kupatila. Uvek držite poklopac zatvorenim, jer će se efikasnost desikanta smanjiti usled upijanja vlage iz vazduha iz okoline. Uređaj čistite nežnom krpom. Nikada nemojte koristiti jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje. Nemojte prskati nikakvu tečnost po unutrašnjosti uređaja i UV lampi.

## Rešavanje problema

- *Kada pritisnem dugme za početak, ne pali se nijedno svetlo:* Da li je poklopac dobro zatvoren i da li ste pritisnuli dugme za početak? Ako jeste, proverite da li je AC adapter dobro

utaknut u uređaj i u strujnu utičnicu/napajanje, kao i da li postoji zidni prekidač koji kontroliše utičnicu/napajanje koji je možda u isključenom položaju. Dalje možete pokušati sa novim AC adapterom (može se nabaviti u prodavnici u kojoj ste kupili uređaj, servisnom centru ili na internet adresi [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Za zamenu koristite samo adapter koji isporučuje proizvođač. Ako uređaj i dalje neće da se uključi, moguće je da postoji kvar na unutrašnjoj elektronici. Vratite uređaj u prodavnicu u kojoj ste ga kupili ili servisni centar gde će ga pregledati.

- *Uređaj je bučan:* Problemi sa bukom obično imaju veze sa propelerom. Zvuk odzvanja unutar uređaja pa se izvesna količina buke može očekivati, čak i ako potiče od propelera s kugličnim ležajevima visokog kvaliteta koji se koristi u ovom proizvodu. Ako intenzitet ili frekvencija buke propelera varira, isključite uređaj sa napajanja i proverite da ne postoji neka prepreka koja ometa rad propelera. Ako nema prepreke, pošaljite uređaj na servisiranje.
- *Uređaj ne suši kako treba:* Da li ste redovno menjali Dry-Brik? Važno je da ga zamenite svaka dva meseca, u skladu sa uputstvima. Proverite da li se propeler pomera. Ako se ne čuje nikakav zvuk, vratite uređaj u prodavnicu u kojoj ste ga kupili ili servisni centar da ga pregledaju.

## Za uređaje koji imaju UV lampu:

- *Plavo svetlo ne svetli prvih 1½ minuta radnog ciklusa, a zeleno svetlo svetli:* Proverite da li je UV lampa čvrsto postavljena u njenu čašicu. Ako nije, izvadite lampu i ponovo je postavite, čvrsto zatvorite poklopac i ponovo pokrenite uređaj. Ako plavo svetlo ne svetli prvih 1½ minuta, zamenite UV lampu (može se nabaviti u prodavnici u kojoj ste kupili uređaj, servisnom centru ili na internet adresi [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Za zamenu koristite samo posebnu lampu koju isporučuje proizvođač. Ako ne svetli ni plavo ni zeleno svetlo, pogledajte odeljak „Kada pritisnem dugme za početak, ne pali se ni jedno svetlo“ koji se nalazi iznad.
- *U UV lampi se nalazi metalna kuglica:* U zavisnosti od proizvođača lampe, neke lampe imaju metalnu kuglicu u cevi i to je sasvim normalno. Ona je rezultat ekološkog proizvodnog procesa kojim se zagađivači koji se prenose vazduhom svode na minimum.

*Ako ništa od gorenavedenog ne reši problem:*

U Severnoj Americi, pozovite Korisnički servis na 1-888-327-1299 ili posetite internet stranice [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Izvan Severne Amerike, obratite se osoblju prodavnice u kojoj ste kupili uređaj ili servisnom centru radi pregleda uređaja.

\* Neki uređaji nemaju germicidnu lampu. Ako je ni vaš uređaj nema, zanemarite sva uputstva ili komentare koji se odnose na „germicidno“, „plavo svetlo“, „ultraljubičasto“, „UV“ i „lampu“.