

DRY & STORE®

Driftinstruktioner

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Den här produkten är avsedd för användning i hushållet. Vid användning av elektriska produkter, speciellt med barn närvarande, måste en del skyddsåtgärder alltid iakttagas inklusive:

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

FARA – Minska risken för elektrisk chock:

- Använd inte apparaten i badet.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla i ett kar eller i en diskho.
- Placera inte eller tappa i vatten eller annan vätska.
- Försök inte att ta i apparaten om den har ramlat i vatten. Dra ur kontakten omedelbart.

WARNING – Minska risken för brännskador, elektrisk stöt eller personskada:

- Övervaka noggrant användning på eller nära barn eller handikappade.
- Använd produkten enbart för vad den är avsedd till, som det beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar riktigt, har tappats eller skadats, eller har tappats i vatten. Returnera den till inköpsstället eller servicecentralen för undersökning och reparation.
- Placera aldrig produkten på en mjuk yta, som en kudde eller säng. Håll alla luftöppningar fria från bomulls fibrer, hår och liknande.
- Använd inte apparaten utomhus eller där sprejprodukter, eller syrgas används.
- AC-adaptorn som levereras med apparaten är tillverkad speciellt för den. Använd inte apparaten med någon annan anordning, och använd inte en adapter från någon annan enhet i stället.
- Vissa Dry & Store-enheter använder bakteriedödande ultraviolett ljus (UV) för rengöring. Denna lampa tänds inte när locket är öppet. Modifiera eller kringgå ej några komponenter som kan medföra exponering av UV-ljus.*
- Om lampan* går sönder ska den genast kopplas ur. Använd handskar när glasbitar tas bort. Kasseras korrekt.

NOTERA – Denna produkt är inte framtagen för att diagnostisera, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom.

DRIFTFÖRHÅLLANDEN

Arbetstemperaturen för denna apparat är 35° till 40° C (95° to 104° F). Denna apparat fungerar korrekt vid inomhustemperaturer från 18° till 30° C (65° to 86° F).

SPARA INSTRUKTIONERNA

Introduktion

Denna produkt är konstruerad för alla typer av hörhjälpmedel inklusive hörapparater, brusapparater, öronsnäckor och tillbehör till implantat. Används produkten dagligen kan den få de flesta hörhjälpmedel att låta bättre, hålla längre samt fungera mer pålitligt och zinkluftsbatteriernas livslängd kan förlängas i hög luftfuktighet. Med sin exklusiva Dry-Max™-teknologi tar Dry & Store bort skadliga fuktansamlingar, torkar öronvax och rengör ytor som exponeras för den bakteriedödande lampan (om denna finns).

Före första användning (Viktigt)

1. **Aktivera dessikanten:** En Dry-Brik för engångsbruk är inkluderad, vilken måste bytas varannan månad. Dry-Brik har tre viktiga funktioner: (1) att permanent ta bort fukt molekyler som frigörs från enheterna under torkningen; (2) att minska den relativa fuktigheten i boxen till en mycket lägre nivå än vad som är möjligt med bara en värmare vilket maximerar torkkapaciteten; och (3) att ta bort dålig lukt.

Aktivera Dry-Brik genom att ta bort skyddsfolien (**Figur 1**). Eftersom Dry-Brik börjar absorbera fukt så fort folien tas bort ska folien inte tas bort förrän du är redo att använda Dry-Brik.




2. **Anteckna aktiveringsdatum:** Ett kort har fästs på varje Dry-Brik som uppmärksammar dig på när det är dags för byte. Anteckna datumet när Dry-Brik aktiverades på detta kort (**Figur 2**).



OBS: För att säkerställa maximal prestanda ska Dry-Brik bytas varannan månad.



3. **Placera en aktiverad Dry-Brik** i din enhet, som **Figur 3** visar.
4. **Anslut nätadaptorn:** Den lilla runda kontakten passar på baksidan av enheten (**Figur 4**). Ta inte i för hårt, den ska glida in lätt. Sätt slutligen i nätadaptorn i ett aktivt eluttag.

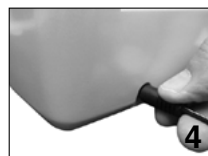

Bruksanvisning

1. Torka bort fukt och öronvax från din hörapparat innan du placerar den i torkkammaren. Öppna luckan och placera din



* Vissa modeller har ingen bakteriedödande lampa. Om detta gäller din apparat vänligen bortse från instruktioner och kommentarer som berör "bakteriedödande", "blått ljus", "ultraviolett" och "lampa".

hörapparat eller implantatet i det stora utrymmet till höger. Du kan låta batterierna vara kvar, men öppna luftluckan för cirkulationens skull.

2. Stäng locket och tryck försiktigt på start-knappen på framsidan av enheten (**Figur 5**). Ett grönt ljus kommer att synas bakom start-knappen under hela rengöringen som tar cirka 8 timmar.



En komplett rengöring på 8 timmar ger bäst resultat men även så kort som 30 minuter gör nytta. När locket öppnas stannar apparaten och timern återställs.

Om din enhet har en UV-lampa för rengöring kommer en blå lampa lysa på enheten 1½ minut efter att enheten startats. Detta indikerar att rengöring pågår.

3. Det är viktigt att byta ut Dry-Brik två månader efter aktivering för att bästa möjliga skötsel av din hörapparat ska kunna säkerställas. Kassera förbrukad Dry-Brik med hushållsavfall.

Om UV-saneringscykeln*

Öroninsatser och hörapparatur härbärger mikrober och bakterier. Med vissa modeller medföljer en bakteriedödande UV-lampa som dödar dessa organismer, vilket resulterar i att många användare upplever mindre irritation och klåda. Den rengörande effekten är starkast närmast lampan och minskar med avståndet. Denna apparat är dock inte steriliserande, och tillverkaren gör inga påståenden angående graden av bakteriedödande effekt. Den är inte framtagen för att diagnostisera, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom. UV-lampan kan avlägsnas utan att påverka uttorkningsfunktionen eftersom den inte är en del av uppvärmningscykeln.

Användning med implantatutrustning

Implantathårdvara måste hållas torr för att fungera korrekt och regelbunden användning av denna apparat kan motverka fukt som uppstår på grund av miljöfaktorer och/eller svett. Vissa användare kan märka en förbättring av zinkluftsbatteriets livslängd, särskilt i varmt och fuktigt klimat. Individuella resultat varierar. Här följer ett par förslag:

- **Talprocessorer bakom örat:** Lämna zinkluft-batterierna bakom örat (om det går) men ta bort batteriluckan. Placera processorn, huvuddel och kabel i torkfacket till höger. Placera ingenting annat än desickanten till vänster i lådan.
- **Kroppsburna talprocessorer:** placera så många komponenter i torkfacket som får plats utan att de trängs ihop och hindrar luftflödet. Storleksbegränsningar kan innebära att processorn måste underhållas separat från annan hårdvara. Om detta är fallet bör mikrofonanordningen underhållas oftare än processorn, då denna är känsligare för fuktskador. Batteripaketet kan avlägsnas från vissa processorer, om den kombinerade storleken är för stor för torkfacket.

Allmän produktskötsel

För bästa resultat bör denna apparat ej användas i fuktiga miljöer såsom badrum. Locket bör hållas stängt då den uttorkande effekten reduceras av fuktupptagning från den omgivande luften. Rengör med en mjuk trasa. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller slipmedel. Spraya inte vätska i facket eller på UV-lampan.

Felsöka problem

- **Inga ljus tänds efter att du tryckt på start-knappen:** Är locket ordentligt stängt och har du tryckt in start-knappen? Om ja, kontrollera att nätadaptern är ordentligt kopplad till både apparaten och eluttaget samt att eluttaget inte är avstängt med eventuell avstängningsknapp. Om det fortfarande inte fungerar försöker du med en annan adapter på inköpsstället, ett servicecenter eller på www.dryandstore.com). Byt endast mot en adapter som levereras av tillverkaren. Om enheten ändå inte startar kan den inbyggda elektroniken vara skadad. Lämna i detta fall apparaten på inköpsställe eller servicecenter för kontroll.
- **Enheten bullrar:** Bullerproblem är normalt relaterade till fläkten. Ljud resonerar inuti enheten, så vissa ljud kan förväntas, även från den högkvalitativa kullagersfläkt som används i denna produkt. Om fläktljudet varierar i intensitet och frekvens kopplar du bort enheten från strömmen och kontrollerar med avseende på hinder. Om du inte hittar något lämnar du in enheten för service.
- **Enheten torkar inte ordentligt:** Har Dry-Brik bytats ut regelbundet? Det är viktigt att den byts i enlighet med anvisningarna. Om inga fläktljud hörs returnerar du enheten till inköpsstället eller servicecentret för utvärdering.

För enheter som innehåller en UV-lampa:

- **Det blå ljuset lyser inte under den första 1½ minuten av rengöringscykeln, men det gröna ljuset är på:** Kontrollera att UV-lampan är ordentligt kopplad till kontaktorna. Om inte placerar du om lampan och startar sedan enheten med locket ordentligt stängt. Om det fortfarande inte kommer blått ljus under de första 1½ minuterna byter du UV-lampa (finns på inköpsstället, ett servicecenter eller på www.dryandstore.com). Byt endast mot en speciellampa som levereras av tillverkaren. Om både den blå och gröna lampan inte lyser, se "Inga lampor lyser..." ovan.
- **Metallkula i UV-lampan:** Vissa lampor, beorende på tillverkare, har en metallkula inuti röret, vilket är helt normalt. Det är ett resultat av deras miljösensitiva tillverkningsprocess.

Om du inte kan åtgärda problemet med något av ovanstående:

I Nordamerika ringer du Customer Service på 1-888-327-1299 eller besöker www.dryandstore.com

Utanför Nordamerika kontaktar du inköpsstället eller en servicecentral för evaluering.

* Vissa modeller har ingen bakteriedödande lampa. Om detta gäller din apparat vänligen bortse från instruktioner och kommentarer som berör "bakteriedödande", "blått ljus", "ultraviolett" och "lampa".