



Инструкции за работа със Zephyr

Важни предпазни мерки

Zephyr на Dry & Store® е за домашна употреба. При използване на електрически продукти, особено в присъствието на деца, трябва винаги да бъдат спазвани основните предпазни мерки, включително:

Прочитане на всички инструкции преди употреба

ОПАСНОСТ - За да намалите риска от електрически удар:

Не използвайте продукта, докато се къпете.

- Не поставяйте и не съхранявайте продукта на места, от където може да падне или да се озове във вана или в умивалник.
- Не го поставяйте и не го изпускате във вода или в друга течност.
- Не докосвайте това устройство, ако е паднало във вода. Веднага го изключете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За да намалите риска от изгаряния, електрически удар, пожар или нараняване:

- Наблюдавайте непрекъснато използването му от или в близост до деца или инвалиди.
- Използвайте този продукт само по предназначението му, както е описано в това ръководство.
- В никакъв случай не работете с продукта, ако кабелът или щепселът му е повреден, ако е бил изпускан или повреден, или ако е паднал във вода. Върнете го в мястото на покупка или в сервизен център за проверка и ремонт.
- Никога не поставяйте продукта върху мека повърхност, например върху кушетка или легло. Пазете всички отвори чисти от влакна, косми и подобни.
- Не използвайте устройството на открито и не работете с него на места, където са били използвани аерозолни продукти (спрейове) или е бил подаван кислород.
- Променилнотоковият адаптер, включен в комплекта на устройството, е конструиран специално за този продукт. Не го използвайте за други уреди и не използвайте вместо него адаптер от друго електрическо устройство.

забележка - Zephyr не е създаден за диагностика, предотвратяване, контролиране, лекуване или облекчение на болестни състояния.

условия на работната среда

Zephyr работи в температурен диапазон от 36° до 40° C (от 97° до 104° F). Той ще функционира правилно при околни температури на закрито от 18° до 27° C (от 65° до 80° F).

запазете тези указания

Въведение

При ежедневна употреба Zephyr премахва събралата се влага, която причинява повреди, изсушава ушната кал и отстранява миризмите. Zephyr може да направи слуховите апарати да изглеждат по-добре, както и да увеличи срока на експлоатация на цинково-въздушната батерия в места с висока влажност.

Сглобяване

- 1. Активирайте десиканта:** Включен е Dry Brik® за еднократна употреба, който трябва да се подменя на всеки два месеца. Dry-Brik има две важни функции: (1) трайно да отстранява водните молекули, които се освобождават от изделията по време на цикъла на сушене, и (2) да свежда относителната влажност в в кутията до много по-ниско ниво отколкото е възможно само с нагревател, като по този начин се увеличава до максимум способността за изсушаване.

За да активирате Dry-Brik, махнете фолиевото покритие (фигура 1). Не отстранявайте фолиото докато не сте готови да използвате Dry Brik, тъй като веднага след отстраняването му Dry Brik ще започне да адсорбира влага.



- 2. Запишете датата на активиране:** С цел предупреждаване когато е време да го подмените, към всеки Dry-Brik е закрепена карта. Запишете на тази карта датата на активиране на Dry-Brik (фигура 2).

ЗАБЕЛЕЖКА За да се гарантира максимална производителност, промяна на сухо Brik на всеки 2 месеца.

3. Поставете задействия Dry-Brik в Zephyr (фигура 3).



4. Свържете променливотоковия адаптер:

Включете променливотоковия адаптер в електрически контакт *без превключвател* и след това поставете малкия кръгъл накрайник отзад на устройството.

Работа със Zephyr

1. Избършете прекомерната влага и ушна кал от слуховия си апарат, преди да го поставите в предната подсушаваща камера. Можете да не изваждате батерията, но трябва да оставите капака ѝ отворен, за да има циркулация на въздуха.
2. Затворете капака и натиснете бутона вкл./изкл. от дясната страна на устройството. Зеленият индикатор над бутона вкл./изкл. ще свети по време на осемчасовия цикъл на работа, след който устройството ще се изключи автоматично. Zephyr може да бъде изключен и чрез повторно натискане на бутона вкл./изкл.. Най-добри резултати се постигат при цял осемчасов цикъл, но изсушаване може да се получи и за кратки периоди с продължителност само 1 час.

Използване на Zephyr с оборудване за кохлеарен имплант

Процесорите и другият хардуер на импланта, намиращ се зад ухото, трябва да се поддържа сух, за да функционира правилно. Поставете процесора, елемента, който се поставя на главата и кабела в предното отделение за подсушаване. Редовното използване на Zephyr може да осигури значителна разлика в срока на експлоатация на цинково-въздушната батерия, особено във влажни места (отделните резултати ще бъдат различни). Оставете цинково-въздушните батерии в процесора (където е приложимо), но свалете капака на батериите.

Общи грижи за продукта

Не работете със Zephyr в места с висока влажност, например в баня. Дръжте капака винаги затворен, тъй като ефективността на Dry-Brik ще намалее поради абсорбцията на влага от околния въздух. Почиствайте повърхностите с мека кърпа. В никакъв случай не използвайте силни почистващи препарати или абразиви. Не впръсквайте течност в тавичката.

Отстраняване на проблеми в Zephyr

- *Устройството не се включва (не се вижда зелена светлина):* Уверете се, че бутонът вкл./изкл. е добре натиснат. Проверете дали променливотоковият адаптер е правилно свързан към задната част на устройството и към електрическия контакт. Управлява ли се контактът от степен превключвател? Ако все още не можете да отстраните проблема, пробвайте с друг променливотоков адаптер (можете да го намерите в мястото на покупка, в сервизен център или на адрес www.dryandstore.com). Сменете адаптера *само* с нов адаптер, получен от производителя.

Зелената светлина свети, но устройството не подсушава правилно: Сменян ли е Dry-Brik редовно? Важно е замяната да се извършва на всеки два месеца съгласно инструкциите. Проверете движението на вентилатора. Ако от него не се чува шум, се свържете с мястото, от което сте закупили продукта, или със сервизния център, за да се направи преценка.

Ако нито една от горните мерки не реши проблема:

В Северна Америка позвънете на 1-888-327-1299

или посетете www.dryandstore.com

Извън Северна Америка, се свържете с мястото, от което сте закупили продукта, или със сервизния център, за да се направи преценка.