



## Upute za korištenje – Zephyr VAŽNE MJERE OPREZA

Uređaj Zephyr tvrtke Dry & Store® namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Pri uporabi električnih proizvoda, osobito tamo gdje ima djece, mora se slijediti osnovnih sigurnosnih mjera opreza, koje obuhvaćaju sljedeće:

### PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

**OPASNOST** - da biste umanjili rizik od električnog udara:

- ne koristite tijekom kupanja.
- ne postavljajte i ne skladištite proizvod na mjesto s kojega može pasti ili ga se povući u kadu ili umivaonik.
- ne postavljajte ga i ne ispuštite ga u vodu niti u druge tekućine.
- ne posegните za proizvodom ako upadne u vodu. Odmah ga odvojite od napajanja.

**UPOZORENJE** - da biste umanjili rizik od opekline, električnog udara, požara ili tjelesnih ozljeda:

- pažljivo nadzirite uporabu od strane ili u blizini djece i invalidnih osoba.
- proizvod koristite samo u namijenjenu svrhu kako je opisano u ovom priručniku.
- proizvod nikada ne koristite ako ima oštećen kabel ili utikač, ako ne radi pravilno ili je ispušten ili oštećen ili je upao u vodu. Odnosite ga na mjesto kupnje ili u servisni centar na provjeru i popravak.
- proizvod nikada ne stavljajte na meku plohu, kao što je kauč ili krevet. Pazite da u otvore za zrak ne dospiju trunčice, dlake i slično.
- ne koristite vani niti na mjestima na kojima se koriste aerosolni proizvodi (raspršivači) ili gdje se daje kisik.
- adapter izmjenične struje koji je priložen uz uređaj namijenjen je naročito za ovaj uređaj. Ne koristite ga za druge uređaje i umjesto njega ne koristite adapter niti jednog drugog električnog uređaja.

**NAPOMENA - Zephyr nije namijenjen za dijagnosticiranje, sprječavanje, nadzor, liječenje niti olakšavanje bolesti.**

### UVJETI RADA UREĐAJA

Zephyr radi u opsegu temperatura od 36 ° do 40 °C (97 ° do 104 °F). Pravilno će raditi na sobnoj temperaturi u zatvorenom prostoru od 18 ° do 27 °C (65 ° do 80 °F).

### SAČUVAJTE OVE UPUTE

#### Uvod

Svakodnevnom uporabom Zephyr uklanja štetne nakupine vlage, suši ušni vosak i otklanja neprijatan mirise. Zephyr može pridonijeti boljem zvuku slušnih instrumenata te produžiti vijek zink-zračne baterije u podnebljima s visokom vlažnošću zraka.

#### Sklapanje

1. **Aktivirajte sredstvo za sušenje:** Priloženo je sredstvo za sušenje Dry-Brik® za jednokratnu uporabu koje se mora zamijeniti svaka dva mjeseca. Sredstvo za sušenje Dry-Brik ima dvije važne funkcije: (1) trajno uklanja molekule vlage koje uređaj otpušta tijekom rada te (2) potiskuje relativnu vlagu unutar kućišta na puno nižu razinu nego što je to moguće samo s grijačem te na taj način maksimalno povećava kapacitet sušenja.

Da biste aktivirali Dry-Brik uklonite omot od folije (slika 1). Nemojte uklanjati foliju sve dok niste spremni upotrebljavati Dry-Brik jer kad se folija jednom ukloni sredstvo za sušenje Dry-Brik počinje apsorbirati vlagu.



2. **Zabilježite datum aktivacije:** Na svaki komad sredstva za sušenje Dry-Brik pričvršćena je kartica s obavijesti o datumu zamjene sredstva. Na ovu karticu zapišite datum početka korištenja sredstva za sušenje Dry-Brik (slika 2).

**NAPOMENA - Da bi se osigurala maksimalna učinkovitost, promijenite Dry-Brik svaka 2 mjeseca.**

**3. Postavite aktivirani Dry-Brik u Zephyr (slika 3).**



**4. Priključite adapter izmjenične struje:**

priključite adapter izmjenične struje na električnu utičnicu *bez prekidača*, a potom postavite mali kružni čep u otvor na stražnjoj strani uređaja.

**Korištenje Zephyra**

1. Obrišite suvišnu vlagu i ušni vosak sa slušnih pomagala prije nego ih postavite u prednji dio komore za sušenje. Baterije ne morate vaditi, ali otvorite poklopac odjeljka za baterije kako biste omogućili cirkulaciju zraka.
2. Zatvorite poklopac i pritisnite tipku ON/OFF (uklj./isklj.) s desne strane uređaja. Zeleni pokazatelj iznad tipke ON/OFF (uklj./isklj.) će svijetliti tijekom trajanja ciklusa od osam sati, nakon čega će se uređaj automatski isključiti. Zephyra se može isključiti i ponovnim pritiskom tipke ON/OFF (uklj./isklj.). Najbolji se rezultati ostvaruju provođenjem čitavog ciklusa od osam sati, ali će se sušenje obaviti i pri kraćim ciklusima, već poslije jednog sata.

**Korištenje Zephyra s opremom za kohlearni implant**

Procesori iza uha i drugi uređaji implanta moraju biti suhi da bi pravilno radili. Postavite procesor, glavu i kabel u prednji odjeljak za sušenje. Redovita uporaba Zephyra također može znatno pridonijeti produljenju vijeka zink-zračne baterije, osobito u vlažnim podnebljima (pojedinačni rezultati mogu varirati). Ostavite zink-zračne baterije u procesoru (gdje je primjenjivo), ali odvojite poklopac odjeljka za baterije.

**Opće staranje za proizvod**

Ne koristite Zephyr na mjestima s visokom vlažnošću zraka, kao što je kupaoonica. Uvijek držite zatvoren poklopac, jer će učinkovitost Dry-Brika biti umanjena uslijed vlage apsorbirane iz okolnog zraka. Površine čistite mekom krpom. Nikada ne koristite sredstva za čišćenje niti abrazive. Ne prskajte nikakvu tekućinu na pladanj.

**Rješavanje problema s Zephyrom**

- *Uređaj se ne može pokrenuti (ne svijetli zeleno svjetlo):* Provjerite da li ste tipku ON/OFF (uklj./isklj.) čvrsto pritisnuli. Provjerite da li je adapter izmjenične struje čvrsto priključen i sa stražnje strane uređaja i na utičnicu/napajanje. Da li se utičnica/napajanje kontrolira zidnim prekidačem? Ako i dalje nema uspjeha, pokušajte s drugim adapterom izmjenične struje (možete ga kupiti na mjestu kupnje proizvoda, u servisnom centru ili na [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Adapter zamijenite *samo* adapterom istog proizvođača.
- *Zeleno svjetlo svijetli, ali uređaj ne suši pravilno:* Da li se Dry-Brika redovito mijenja? Važno je da ga se mijenja svaka dva mjeseca sukladno uputama. Provjerite kretanje ventilatora. Ako se ne čuje zvuk ventilatora, obratite se osoblju na mjestu kupnje ili servisnom centru radi procjene.

***Ako ništa od navedenog ne riješi problem:***

u Sjevernoj Americi pozovite 1-888-327-1299

ili posjetite [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

Izvan Sjeverne Amerike, obratite se osoblju na mjestu kupnje ili servisnom centru radi procjene.