



Zephyr'i Kasutusjuhend TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED

Käeolev toode on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. Elektrilisi seadmeid kasutades, eriti laste juuresolekul, tuleb alati järgida esmaseid ohutusabinõusid, nagu:

LUGEGE JUHENDIT ENNE KASUTAMIST

OHTLIK – et vähendada elektrivooluga surmasaamise riski:

- Ärge kasutage vannis.
- Ärge asetage või säilitage toodet seal, kust see võib alla kukkuda või kust seda saaks alla tõmmata kas vanni või kraanikaussi.
- Ärge asetage või pillake vette või mõnda teise vedelikku.
- Ärge haarake antud tootest, kui see on juba vette kukkunud. Viivitamatult katkestage vooluühendus.

HOIATUS – et vähendada põletuste, elektrivooluga surmasaamise, tuleoahu või inimvigastuste riski:

- Kontrollige tähelepanelikult, kui toodet kasutavad lapsed või invaliidid või kui seda kasutatakse nende juures või läheduses.
- Kasutage käesolevat toodet vaid otstarbel, milleks toode on ette nähtud ning nii, nagu käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Ärge kunagi käivitage käesolevat toodet, kui selle juhe või pistik on katki, kui see ei tööta korralikult, kui see on maha kukkunud või katki või kui toode on kukkunud vette. Tagastage toode kauplusesse või teeninduskeskusesse kontrolliks ning paranduseks.
- Ärge kunagi asetage käesolevat toodet pehmele alusele, nagu diivan või voodi. Hoidke kõiki õhuavausi puhtana ning jälgige, et sinna ei satuks ebemeid, karvu ning muud sarnast.
- Ärge kasutage õues või käitage, kui kasutatakse aerosool (sprei) tooteid või kui antakse hapnikku.
- Komplektis olev vahelduvvoolu adapter on valmistatud kasutamiseks ainult koos käesoleva tootega. Ärge seda teiste seadmetega kasutage ning ärge kasutage mõnd suvalist elektriseadme adapterit selle asemel.

MÄRKUS – Zephyr ei ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, jälgimiseks, raviks või leevendamiseks.

PÕHITINGIMUSED

Zephyr töötab temperatuuril vahemikus 36° ... 40° C (97° ... 104° F). Seade töötab korralikult sisetingimustes, kui keskkonna temperatuur on 18° ... 27° C (65° ... 80° F).

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES

Sissejuhatus

Igapäevasel kasutamisel väldib Zephyr kahjulikku niiskuse kogunemist, kuivatab kõrvaõõni ja eemaldab lõhnad. Zephyr võib muuta kuuldeaparaatide kõla paremaks ning pikendada tsink-õhk toiteallika eluiga kõrge niiskusega kohtades.

Kokkupanek

- 1. Kuivatusaine aktiveerimine.** Seadme komplektis on ühekordselt kasutatav kuivatusbrikett Dry-Brik[®], mis tuleb asendada iga kahe kuu järel. Dry-Brik täidab kahte tähtsat funktsiooni: (1) eemaldab kuuldeaparaadist kuivatamise ajal eraldunud niiskuse molekulid; (2) alandab kuivatuskarbi niiskusesisaldust palju madalamale tasemele, kui seda on võimalik saavutada küttekehaga ja suurendab sellega kuivatusvõimet. Dry-Briki aktiveerimiseks eemaldage sellelt fooliumkate (**joonis 1**). Ärge eemaldage fooliumit enne, kui soovite Dry-Brik kasutama hakata, sest niipea kui see on Dry-Brik maha võetud, hakkab Dry-Brik niiskust imama.



- 2. Märkige üles aktiveerimiskuupäev.** Kuivatusbriketi asendamise aja meeldetuletamiseks on Dry-Brik silt. Kirjutage Dry-Brik kasutuselevõtmise kuupäev sellele sildile (**joonis 2**).



NOTE - tagada maksimaalne jõudlus, muuta Dry-Brik iga 2 kuu tagant.



3. Asetage aktiveeritud Dry-Brik Zephyr'i (joonis 3).

4. Ühendage vahelduvvooluadapter.

Ühendage vahelduvvooluadapter *mittelülitatavasse* seinakontakti ning seejärel väike silindriline pistik seadme tagaküljel asuvasse pesasse.



Zephyr'i kasutamine

1. Enne kui asetate kuuldeseadme esiküljel asuvasse kuivatuskambrisse, pühkige seadmelt ülemäärane niiskus ja kõrvavaik. Toiteallikad võite jätta seadmesse, kui avage õhuringluse tagamiseks patareisektsiooni kaas.
2. Sulgege kaas ja vajutage seadme paremal küljel asuvat sisse-väljalülituse nuppu. Sisse-väljalülituse nupu kohal asuv roheline märgutuli põleb 8-tunnise ajavahemiku jooksul ning seade lülitub automaatselt välja. Zephyr'i saab välja lülitada ka sisse-väljalülituse nupu teistkordse vajutamisega. Parimad tulemused saadakse 8-tunnise täieliku tsükli jooksul, kuid kuivatamine leiab aset alates ühe tunnisest ajavahemikust.

Zephyr'i kasutamine koos Cochlear'i implantaadiga

Lisaks kuulmisprotsessorile tuleb ka teised kuuldeparaadi osad hoida nende õigeks funktsioneerimiseks kuivana. Asetage protsessor, kõrvaklapp ja juhe esiküljel asuvasse kuivatusruumi. Korrapärane Zephyr'i kasutamine võib oluliselt pikendada ka tsink-õhk toiteallika eluiga, seda eriti niisketes kohtades (üksiktulemused võivad erineda). Jätke tsink-õhk toiteallikad protsessorisse (kui on rakendatav), kuid eemaldage toiteallika kate.

Toote üldine hooldamine

Ärge kasutage Zephyr'i kõrge niiskustasemega kohtades nagu vannituba. Hoidke kaas pidevalt suletuna, kuna Dry-Brik'i efektiivsus väheneb niiskuse neelamisel ümbritsevast õhust. Puhastage pinnad pehme riidelapiga. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega abrasiivaineid. Ärge pihustage kandikule vedelikke.

Zephyr'il esineda võivate probleemide kõrvaldamine

- *Seade ei käivitu (roheline märgutuli ei sütti).* Veenduge, et sisse-väljalülituse nuppu on vajutatud piisava tugevusega. Veenduge, et vahelduvvooluadapter on kindlat ühendatud seadme tagaseinas oleva pesa ja seinakontaktiga. Kas seinakontakti saab välja lülitada? Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, proovige teist vahelduvvooluadapterit (saadaval seadme ostukohas, hoolduskeskuses, veebilehel www.dryandstore.com). Vahetamisel kasutage *ainult* tootja poolt tarnitavat adapterit.
- *Roheline märgutuli põleb, kuid seade ei kuivata ettenähtud viisil.* Kas Dry-Brik'i on vahetatud korrapäraselt? On oluline, et seda vahetataks iga kahe kuu möödudes vastavalt juhistelet. Kontrollige ventilaatori pöörlemist. Kui ventilaatori müra pole kuulda, pöörduge kontrollimiseks seadme ostukohta või hoolduskeskusesse.

Kui ükski ülaltoodud tegevustest ei lahenda probleemi:

Põhja-Ameerikas helistage 1-888-327-1299

või külastage www.dryandstore.com

Väljaspool Põhja-Ameerikat
pöörduge kontrollimiseks seadme
ostukohta või hoolduskeskusesse.