



Zephyr használati utasítás

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket:

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

VESZÉLY - Az áramütés veszélyének elkerüléséhez:

- Ne használja fürdés közben!
- Ne helyezze vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahonnan a kádba vagy a mosdókagylóba juthat!
- Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba!
- Ne nyúljon a készülékért, ha az vízbe esett!
Azonnal szüntesse meg a hálózati csatlakozást!

VIGYÁZAT - Az égés, áramütés, tűz vagy személyi sérülés elkerüléséhez:

- Gondosan felügyelje a használatot, ha azt gyermekek vagy más személyek, illetve ezek közelében végzik!
- Kizárólag e kézikönyvben leírt célra használja a készüléket!
- Sohase működtesse a terméket sérült csatlakozó zsinórral vagy dugóval, ha az nem működik megfelelően, ha az leesett vagy megsérült, illetve vízbe esett! Vizsgálat és javítás céljából vigye vissza azt az értékesítőhöz vagy a szerviz központba!
- Sohase helyezze a terméket puha felületre, például, heverőre vagy ágyra! Tartsa a szellőzőnyílásokat szösztól, hajtól és hasonlóktól mentesen!
- Ne használja szabadban, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszol (permetező) termékeket használnak, vagy ahová oxigént vezetnek be!
- Az egységhez tartozó hálózati adapter kifejezetten ehhez a termékhez készült. Ne használja ezt más készülékhez, és ne használjon e helyett más elektromos készülékhez tartozó adaptert!

MEGJEGYZÉS - A Zephyr nem betegség diagnosztizálására, megelőzésére, figyelésére, kezelésére vagy enyhítésére készült.

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

A Zephyr 36° C és 40° C (97° F és 104° F) hőmérséklet tartományban működik. Megfelelően fog működni 18° C és 27° C (65° F és 80° F) közötti szobahőmérsékleten.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Bevezetés

Minden nap használva a Zephyr eltávolítja az összegyűlt nedvességet, szárítja a fülzsírt és eltávolítja a szagokat. A Zephyr használatával a hallókészülékek jobban működnek, és magas páratartalmú környezetben a cink-levegős elemek élettartama is növekszik.

Összeállítás

- 1. Aktiválja a szárító készüléket:** Egy eldobható, kéthavonta cserélendő Dry-Brik® a csomag része. A Dry-Brik két fontos funkciót tölt be: (1) véglegesen eltávolítja a nedvességet kiváltó, az eszközökből a szárítási ciklus során felszabaduló molekulákat, és (2) a dobozon belüli relatív páratartalmat sokkal alacsonyabb szintre szorítja le, mintha csupán légfűtést alkalmaznánk, ezáltal maximalizálja a készülék szárító képességét.

A Dry-Brik a védőfólia eltávolításával aktiválható (1. ábra). Ne távolítsa el a védőfóliát, amíg nem áll készen a Dry-Brik használatára, mivel amint eltávolította a védőfóliát, a Dry-Brik azonnal elkezd magába szívni a nedvességet.



- 2. Jegyezze fel az aktiválás dátumát:** Minden Dry-Brik egy kártyával rendelkezik az oldalán, mely figyelmeztet arra, mikor esedékes a cseréje. Jegyezze fel erre a kártyára azt a dátumot, amikor a Dry-Brik használatát először megkezdte (2. ábra).

Megjegyzés - A maximális teljesítmény érdekében módosítsa a Dry-Brik 2 havonta.

3. Helyezze az aktivált Dry-Briket a Zephyrbe (3. ábra).



4. A hálózati adapter csatlakoztatása:

Csatlakoztassa az adaptert egy nem kapcsolós aljzathoz, majd kis kör alakú csatlakozót csatlakoztassa a készülék hátuljához.

A Zephyr használata

1. Törölje le a felesleges nedvességet és fülzsírt hallókészülékeiről, mielőtt az első szárítókamrába helyezi azokat! Bennhagyhatja az elemeket, de nyissa ki az elemtartó fedelét a levegőkeringés biztosításához!
2. Zárja le a fedőt és nyomja meg az „ON/OFF” gombot a készülék jobb oldalán. Az „ON/OFF” gomb feletti zöld jelzőlámpa 8 órán keresztül fog világítani, majd a készülék magától kikapcsol. A készüléket az „ON/OFF” gomb újbóli megnyomásával is ki tudja kapcsolni. A legjobb eredményt a teljes 8 órás ciklus biztosítja, de a száradás már egy óra után is jelentkezhet.

Zephyr használata cochlearis implantátummal

A megfelelő működéshez a processzornak és az implantátum más részeinek a fül mögött szárazon kell maradniuk. Helyezze a processzort, a jelátvivőt és a kábelt az elülső szárító rekeszbe! Bizonyos esetekben a Zephyr használata jelentős eltérést eredményez a cink-levegő elem élettartamában, különösen nedves környezetben (egyedi variációk előfordulhatnak). Hagyja a cink-levegő elemeket a processzorban (ahol alkalmas), de távolítsa el az elemtartó fedelét!

A termék általános gondozása

Ne használja a Zephyrt magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában. Tartsa a fedelet állandóan zárva, mivel a Dry-Brik hatékonyságát csökkenti a környező levegőből elnyelt nedvesség. Végezze a felületek tisztítását puha ruhával! Sose használjon erős tisztító- vagy súrolószert! Ne permetezzen semmilyen folyadékot a tálcába!

Hibaelhárítás

- *A készülék nem indul el (zöld lámpa nem ég):* Ellenőrizze, hogy az „ON/OFF” gombot elég erősen nyomta-e meg. Ellenőrizze a hálózati adapter biztos csatlakoztatását az egység hátuljához és a fali csatlakozóhoz! Van a fali csatlakozó előtt kapcsoló? Ha ez még mindig nem hoz eredményt, próbálkozzon egy másik hálózati adapterrel (amely beszerezhető az értékesítőtől, a szerviz központból vagy a www.dryandstore.com címen)! *Csak* a gyártó által biztosított adapterre cserélje ki!
- A zöld jelzőlámpák világít, de a készülék nem szárít jól. Rendszeresen cserélte a Dry-Brik betétet? Fontos az utasítások szerinti rendszeres (2 havonkénti) csere elvégzése. Ellenőrizze a légkeverő mozgását Amennyiben nem hallható ventilátor zaj, lépjen kapcsolatba az értékesítővel vagy a szerviz központtal vizsgálat céljából!

Amennyiben a fentiek egyike sem szünteti meg a problémát:

Észak-Amerikában hívja az ügyfélszolgálatot az 1-888-327-1299 számon vagy látogasson a www.dryandstore.com honlapra!

Észak-Amerikán kívül lépjen kapcsolatba az értékesítővel vagy a szerviz központtal, kiértékelés céljából!