



Zephyr Eksploatacinės Instrukcijos SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Šis prietaisas yra skirtas naudojimui namų ūkyje. Kai naudojate elektros prietaisus, ypatingai kai yra vaikų visada turite laikytis pagrindinių atsargos priemonių, tame tarpe:

PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

PAVOJUS – žūties nuo elektros srovės rizikos sumažinimui:

- Nenaudokite kai maudotės.
- Nepadėkite ir nelaikykite prietaiso tose vietose nuo kurių jis gali nukristi į vonią ar kriauklę.
- Nepanardinkite ir neleiskite vandeniui arba kitokiam skysčiui varvėti ant jo.
- Neliekit šio prietaiso, jeigu jis įkrito į vandenį. Nedelsiant ištraukite šakutę.

ĮSPĖJIMAS – nusideginimų, žūties nuo elektros srovės, gaisro arba asmenų sužalojimo rizikai sumažinti:

- Atidžiai stebėkite kai naudoja vaikai arba neįgalūs asmenys – kai naudoja patys arba naudojant šalia jų.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį kaip parašyta vadove.
- Niekada neeksploatuokite prietaiso jeigu laidas arba kištukas yra sugadinti, tinkamai neveikia, prietaisas buvo numestas, arba sugadintas, arba įmestas į vandenį. Sugrąžinkite jį į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą patikrinimui ir pataisymui.
- Niekada nepadėkite prietaiso ant minkšto paviršiaus, tokio kaip minkštasuolis arba lova. Saugokite, kad į oro angą nepatektų pūkeliai, plaukai ir panašūs elementai.
- Nenaudokite lauke ir neeksploatuokite tose vietose kur naudojami aerozolių (purškalo) produktai arba kur skiriamas deguonis.
- AC adapteris yra komplektuojamas su šiuo įrengimu ir yra specialiai pagamintas šiam prietaisui. Nenaudokite su kitais prietaisais ir nenaudokite jokio kito elektrinio prietaiso adapterio vietoje suteikiamo.

PASTABA – Zephyr nėra sukurtas ligos diagnozavimui, sustabdymui, sekimui, gydymui arba palengvinimui.

EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Zephyr veikia nuo 36° iki 40° C (nuo 97° iki 104° F) temperatūrų ribose. Jis normaliai funkcionuos patalpoje aplinkos temperatūrose nuo 18° iki 27° C (nuo 65° iki 80° F).

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Įvadas

Naudojant kas dieną, pašalina kenksminą drėgmės susikauptimą, išdžiovina ausų vašką ir pašalina kvapą. Daugumai klausos instrumentų Zephyr suteiks geresnį garsą, taip pat gali prailginti cinko-oro baterijos tarnavimo laiką aukštos drėgmės sąlygose.

Surinkimas

1. **Sausiklio suaktyvinimas.** Kartu tiekiamas vienkartinis „Dry-Brik“® sausiklis, kurį reikia keisti kas du mėnesius. „Dry-Brik“ atlieka dvi svarbias funkcijas: (1) visiškai pašalina drėgmės molekules, susidarancias ant prietaisų džiovinimo ciklo metu, ir (2) stipriai sumažina santykinę drėgnį dėžutėje (t. y., daugiau, nei tai įmanoma naudojant tik šildytuvą), todėl labai padidėja džiovinimo geba.

„Dry-Brik“ suaktyvinamas nuplėšus dengiamąją plėvelę (1 pav.).

Nenuplėškite dengiamosios plėvelės, kol esate nepasirengę naudoti „Dry-Brik“, nes nuplėšus plėvelę „Dry-Brik“ ima absorbuoti drėgmę.



2. **Suaktyvinimo datos užrašymas.** Informacijai, kada laikas keisti sausiklį, ant kiekvieno

„Dry-Brik“ pritvirtinta etiketė. Užrašykite joje datą, kada ėmėte naudoti „Dry-Brik“ (2 pav.).



PASTABA - Siekiant užtikrinti maksimalų efektyvumą, pakeiskite Dry-Brik kas 2 mėnesius.

3. Aktyvintą Dry-Brik įdėkite į Zephyr (3 pav.).

- ### 4. Prijunkite prie AC adapterio:
- AC adapterį įjunkite į *ne jungikliu valdomą* elektros energijos lizdą, o tada mažą apvalų kištuką įkiškite į užpakalinę prietaiso dalį.



Zephyr naudojimas

1. Nuvalykite drėgmės perteklių ir ausų sierą nuo klausos aparatų įdėkite juos į džiovinimo kamerą. Baterijas galite palikti viduje, bet atidarykite baterijos dangtelį ir leiskite cirkuliuoti orui.
2. Uždarykite visus dangtelius ir nuspauskite ĮJUNGTI/IŠJUNGTI mygtuką, kurį rasite dešinėje prietaiso pusėje. Žalias rodiklis virš mygtuko ĮJUNGTI/IŠJUNGTI švies aštuonias valandas, ir tada automatiškai išsijungs prietaisas. Zephyr taip pat galima išjungti antrą kartą nuspaudžiant mygtuką ĮJUNGTI/IŠJUNGTI. Geriausių rezultatų sulauksite iš pilno Dry & Store ciklo, bet kondicionavimas gali atsirasti po periodų tokių trumpų kaip 30 minučių.

Zephyr naudojimas su kochlearinių implantų įranga

Kad tinkamai funkcionuotų už ausies užkišami procesoriai ir kitokie implanto elementai turi būti laikomi sausi. Patalpinkite procesorių, laikiklį ir laidą į džiovinimo skyrių dešinėje. Nuolatinis Zephyr naudojimas, kai kuriems prietaisams, suteikia žymų cinko-oro baterijos tarnavimo laiko skirtumą, ypatingai karštu ir drėgnu oru (gali skirtis individualūs atvejai). Palikite cinko-oro baterijas procesoriuje (kai tai taikytina), bet nuimkite baterijos dangtelio.

Bendra prietaiso priežiūra

Zephyr nenaudokite aukštos drėgmės sąlygomis, tokiose vietose kaip, vonios kambarys. Laikykite uždarytą dangtelį visą laiką, kadangi sausiklio veiksmingumas sumažės dėl drėgmės sugėrimo iš aplinkinio oro. Valykite su minkšta pašluoste. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių ir abrazyvų. Į dėklą nepurkškite jokių skysčių.

Zephyr gedimų nustatymast

- *Nepasileidžia prietaisas (nesimato žalios šviesos):* Įsitikinkite, kad stipriai paspaustas mygtukas ĮJUNGTI/IŠJUNGTI. Patikrinkite, kad AC adapteris yra saugiai prijungtas prie užpakalinės prietaiso dalies ir lizdo/elektros tinklo. Jeigu taip, ar sienoje esantis kištukinis lizdas yra kontroliuojamas sienos jungiklio? Jeigu vis dar nepasisekė, pabandykite su kitu AC adapteriu (kurį galite gauti pirkimo vietoje, aptarnavimo centre arba www.dryandstore.com). Pakeiskite *tik* į gamintojo suteikiamą adapterį.
- *Dega žalia švieselė, tačiau prietaisas tinkamai nedžiovinina:* Ar Dry-Brik buvo keičiamas reguliariai? Svarbu, kad jis būtų pakeičiamas kas du mėnesius ir pagal instrukcijas. Patikrinkite ar juda ventiliatorius. Jeigu visiškai negirdite garso, sugrąžinkite prietaisą įvertinimui į pirkimo vietą arba aptarnavimo centrą.

Jeigu nei vienas iš nurodytųjų neišsprendžia jūsų problemas:

Šiaurės Amerikoje, skambinkite telefonu:
1-888-327-1299

arba apsilankykite www.dryandstore.com

Už Šiaurės Amerikos ribų
įvertinimui, susisiekite su vieta
kurioje pirkote ar aptarnavimo
centru.