



Zephyr Generell Bruksanvisning

VIKTIGE ADVARSLER

Dette produktet er til bruk i husholdningen. Det skal alltid, spesielt når barn er til stede, tas grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av elektriske artikler, deriblant:

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

FARE – for å redusere risikoen for dødelige elektriske støt:

- Skal ikke brukes under bading.
- Ikke plassér eller oppbevar produktet et sted hvor det er i fare for falle eller dyttes ned i vaskeservant eller badekar.
- Må ikke settes oppi eller mistes ned i vann eller annen væske.
- Ikke ta i dette utstyret hvis det har falt ned i vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for forbrenning, dødelige elektriske støt, brann eller skade på personer:

- Må overvåkes nøye når det benyttes av, på eller i nærheten av barn eller uføre.
- Dette apparatet må bare brukes i overensstemmelse men den beregnede bruk, slik det er beskrevet denne manualen.
- Dette produktet må ikke brukes hvis ledningen eller pluggen er ødelagt eller ikke fungerer normalt, hvis det har falt i bakken eller blitt ødelagt eller blitt sluppet i vannet. Det skal leveres tilbake til kjøpsstedet eller servicekontoret for å bli undersøkt og reparert.
- Apparatet skal ikke settes på et mykt underlag som en seng eller sofa. Pass på at det ikke kommer lo, hår eller lignende inn i luftåpninger.
- Skal ikke brukes utendørs eller benyttes der hvor aerosol (spray-)produkter er i bruk eller der det brukes oksygen.
- Likestrømsadapteren som følger med enheten er produsert spesielt for dette apparatet. Denne må ikke benyttes sammen med annet utstyr og det må ikke benyttes adapter fra et annet elektrisk apparat som erstatning.

MERK – Zephyr er ikke utformet for å kunne diagnostisere, forhindre, overvåke, behandle eller lindre sykdom.

DRIFTSBETINGELSER

Zephyr operer i et temperaturområde mellom 36° C og 40° C (97° F og 104° F). Det vil virke på riktig måte ved innendørs temperaturer fra 18° C til 27° C (65° F til 80° F).

TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Innledning

Ved daglig bruk vil Zephyr fjerne skadelig fuktighet, tørke ørevoks og fjerne lukt. Zephyr får de fleste hørselsinstrumenter til å gi bedre lyd og vil også forlenge levetiden til sink-luft-batterier der fuktigheten er høy.

Montering

- 1. Aktivere tørkemiddelet:** En Dry-Brik® til engangsbruk, som må skiftes ut annenhver måned, følger med. Dry-Brik utfører to viktige funksjoner: (1) Permanent fjerne fuktighetsmolekyler som frigis fra enhetene i tørkesyklusen, og (2) føre den relative fuktigheten i boksen til et mye lavere nivå enn hva som er mulig kun ved bruk av et varmeelement, og dermed maksimere tørkekapasiteten.

Fjern foliedekket for å aktivere Dry-Brik (**figur 1**). Ikke fjern folien før du er klar til å bruke Dry-Brik, fordi Dry-Brik begynner å absorbere fuktighet med en gang folien fjernes.



- 2. Registrer aktiveringsdatoen:** Et kort er festet på hver Dry-Brik for å varsle når den skal skiftes ut. Noter datoen Dry-Brik ble tatt i bruk på dette kortet (**figur 2**).



MERK - For å sikre maksimal ytelse, endre Dry-Brik hver 2. måned.



3. Sett den aktiverte Dry-Brik inn i Zephyr (figur 3).

4. Kople til vekselstrømadapteren:

Plugg vekselstrømadapteren inn i en elektrisk kontakt uten bryter, og sett deretter den lille runde pluggen inn i enden på enheten.



Bruke Zephyr

1. Tørk av fuktighet og ørevoks fra høreapparatet før de settes inn foran i tørkekammeret.. Batteriene kan stå i, men batterilokket bør åpnes slik at luften får sirkulere.
2. Sett på lokket og trykk på PÅ/AV-knappen på høyre side av apparatet. Den grønne indikatoren over PÅ/AV-knappen lyser i hele åtte timers-syklusen, og apparatet blir slått av automatisk. Zephyr kan også slås av ved å trykke på PÅ/AV-knappen en gang til. De beste resultatene kommer fra en hel åtte timers-syklus, men tørking vil forekomme i periode så korte som 1 time.

Bruke Zephyr med sneglehusimplantatutstyr

Prosessorer plassert bak øret og andre implantater må holdes tørre for å fungere riktig. Legg prosessoren, hodebøylen og kabelen i tørkekammeret på forsiden. Vanlig bruk av Zephyr kan også bedre levetiden til sink-luft batterier betydelig, spesielt i fuktige omgivelser (individuelle resultater varierer). La sink-luft batteriene sitte i prosessoren (når dette er mulig), men ta av batterilokket.

Behandling av utstyret

Ikke bruk Zephyr i rom med høy fuktighet, for eksempel på badet. Hold lokket stengt hele tiden siden Dry-Brik blir mindre effektiv ved absorpsjon av fuktighet fra den omgivende luften. Tørkes av med en myk klut. Bruk aldri kraftige vaskemidler eller flekkjernere. Ikke spray væske inn på brettet.

Feilsøke Zephyr-problemer

- *Apparatet starter ikke (grønn lampe lyser ikke):* Sørg for at PÅ/AV-knappen er trykket godt inn. Påse at vekselstrømsadapteren er ordentlig tilkople bak på enheten og i strømuttaket. Kontrolleres uttaket/hovedstrømmen av en veggbryter? Hvis heller ikke dette hjelper, forsøk en vekselstrømadapter (kan fås der hvor enheten ble kjøpt, et servicesenter eller hos www.dryandstore.com). Skal bare skiftes ut med en adapter som produsenten har godkjent.
- *Den grønne lampen lyser, men apparatet tørker ikke ordentlig:* Er Dry-Brik-brikken skiftet ut nylig? Det er viktig at denne skiftes ut hver annen måned i henhold til bruksanvisningen. Se om viften beveger seg. Hvis det ikke høres viftelyd skal utsalgsstedet eller et servicesenter kontaktes for vurdering.

Dersom problemet ikke kan løses ved hjelp av det ovenstående:

I Nord-Amerika, ring til Kundetjenesten på
1-888-327-1299

eller gå til www.dryandstore.com

Utenfor Nord-Amerika skal utsalgsstedet eller et servicesenter kontaktes for vurdering.