



# DryKlean UV.

## WAT IS INBEGREPEN

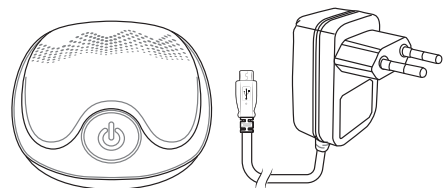


## VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

1

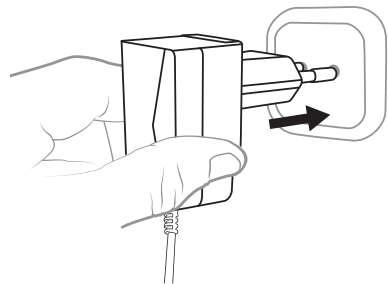


2

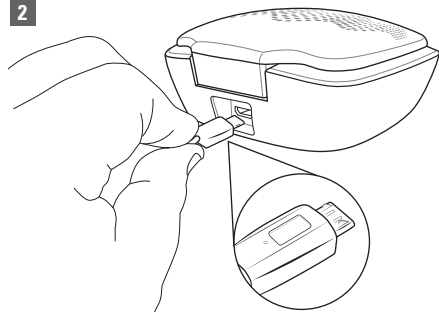


## DAGELIJKS GEBRUIK


3

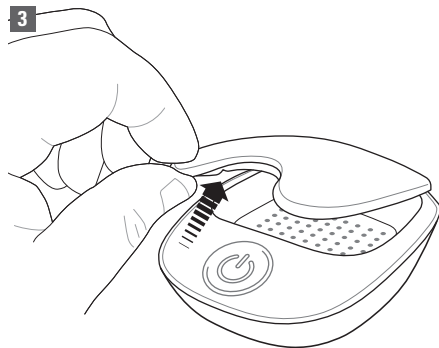


4

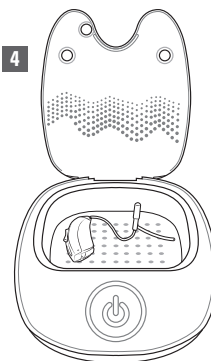

5

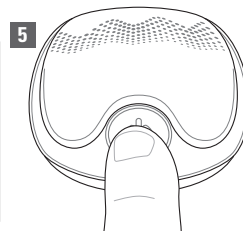

6

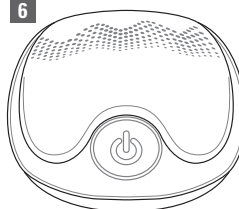

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij het gebruik van elektrische producten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

**GEVAAR**—Om het risico op elektrocutie te verminderen:

- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
- Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen
- Grijp niet naar dit apparaat als het in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk los.

**WAARSCHUWING**—Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- **Open NOOIT het droogcompartiment terwijl het UV-licht brandt. Als u met het blote oog naar het UV-licht kijkt, kan dit ernstige brandwonden aan het oog veroorzaken.**
- Houd nauw toezicht op het gebruik door, op of in de buurt van kinderen of invaliden.
- Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet correct werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Retourneer het naar de plaats van aankoop of het servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
- Plaats het product nooit op een zachte ondergrond zoals een bed. Houd eventuele luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en dergelijke.
- Niet buitenshuis gebruiken of bedienen waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- De AC-adapter die bij uw apparaat is geleverd, is speciaal voor dit product gemaakt. Gebruik het niet met een ander apparaat en gebruik in plaats daarvan geen adapter van een ander elektrisch apparaat.

**OPMERKING:** dit product is niet bedoeld voor het diagnosticeren, voorkomen, bewaken, behandelen of verlichten van ziekten.

## BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Bij een omgevingstemperatuur van 21°C (70°F) is de bedrijfstemperatuur van dit apparaat 42-45°C (107-113°F).

De UV-lamp wordt uitgeschakeld als het deksel wordt geopend tijdens de ontsmettingscyclus. De lamp gaat ook uit aan het einde van de cyclustijd van 5 minuten.

Als de UV-droger langere tijd niet wordt gebruikt, kan het zijn dat de lamp niet onmiddellijk gaat branden. Start het apparaat gewoon opnieuw op.

**GARANTIESERVICE (BUITEN NOORD-AMERIKA)**

Neem contact op met de vestiging waar u uw droogeenheid heeft gekocht.

---


**DryKlean.UV.**

+31407602111 | [info@dryandstore.com](mailto:info@dryandstore.com)

©ETC DRYKLN UV (DUTCH) QSG 1120 Rev A

# DryKlean.UV<sup>®</sup>

UV-convectie droger

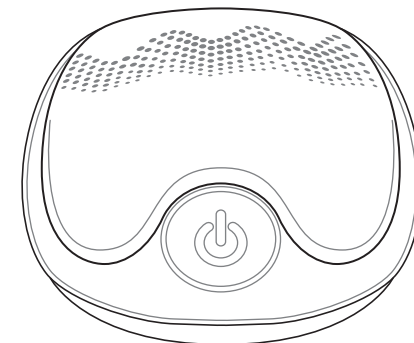

## Snelstartgids



EAR TECHNOLOGY CORPORATION  
Helping people hear better, every day.™