

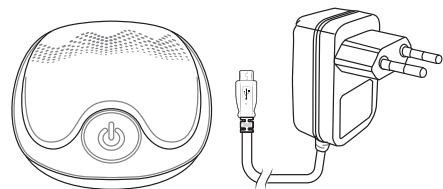


# DryKlean UV.





## CE QUI EST INCLUS

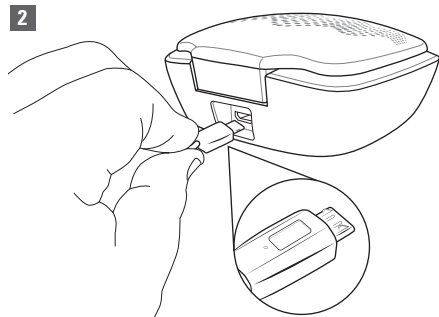

## PRÉPARATION À L'UTILISATION

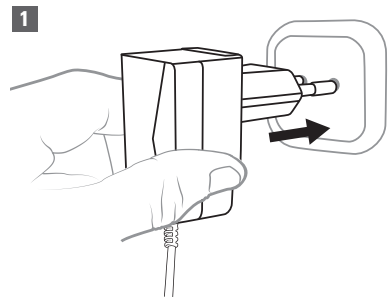

## USAGE QUOTIDIEN

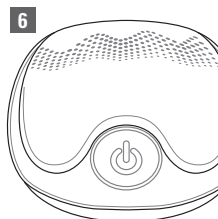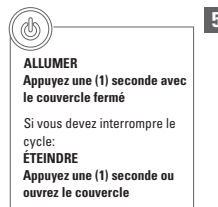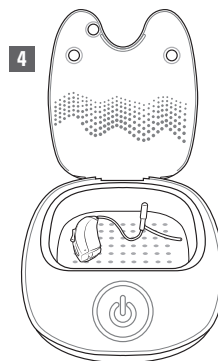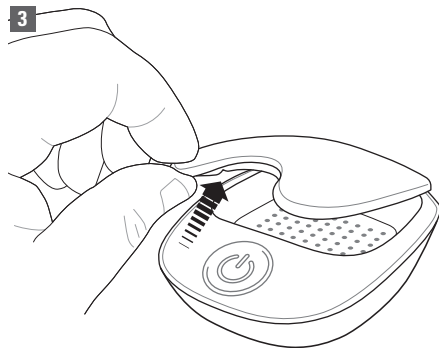

4

5

6



**ALLUMER**

Appuyez une (1) seconde avec le couvercle fermé

Si vous devez interrompre le cycle:

**ÉTEINDRE**

Appuyez une (1) seconde ou ouvrez le couvercle

Cycle de séchage



4 HEURES

Cycle de désinfection



5 MIN

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Ce produit est destiné à un usage domestique. Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment:

**DANGER**—Pour réduire le risque d'électrocution:

- Ne pas utiliser pendant le bain.
- Ne placez pas et ne stockez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide
- N'attrapez pas cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement.

**AVERTISSEMENT**—Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

- Surveillez étroitement l'utilisation par des enfants ou personnes invalides.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide.
- N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez-le au lieu d'achat ou au centre de service pour examen et réparation.
- Ne placez jamais le produit sur une surface molle telle qu'un lit. Gardez les ouvertures d'air propre (poils, tissus etc.)
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni fonctionner là où des produits aérosols sont utilisés et où de l'oxygène est administré.
- L'adaptateur secteur fourni avec votre appareil est spécialement conçu pour ce produit. Ne l'utilisez pas avec un autre appareil et n'utilisez pas l'adaptateur d'un autre appareil électrique à sa place.

**REMARQUE: ce produit n'est pas conçu pour diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter ou soulager une maladie.**

## DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

À une température ambiante de 21°C (70°F), la température de fonctionnement de cet appareil est de 107-113°F (42-45°C).

La lampe UV s'éteint si le couvercle est ouvert pendant le cycle de désinfection. La lampe s'éteint également à la fin du temps de cycle de 5 minutes.

Si le sècheur UV n'est pas utilisé pendant de longues périodes, la lampe peut ne pas s'allumer immédiatement. Redémarrez simplement l'unité.

**SERVICE DE GARANTIE** Contactez votre revendeur

---


**DryKlean.UV.**

+31407602111 | [info@dryandstore.com](mailto:info@dryandstore.com)

©ETC DRYKLN UV (FRE) QSG 1120 Rev A

# DryKlean.UV<sup>®</sup>

Sécheur à convection UV

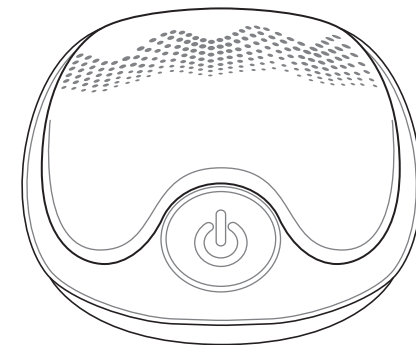

## Guide rapide de démarrage



EAR TECHNOLOGY CORPORATION  
Helping people hear better, every day.