

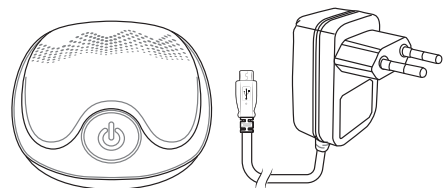


DryKleanUV.




WAS IST INBEGRIFFEN

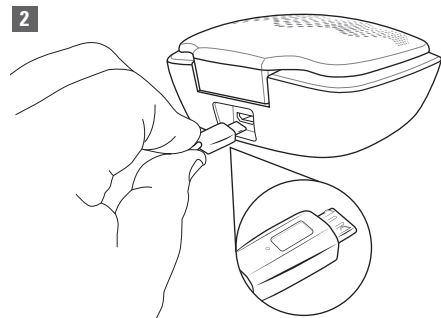

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

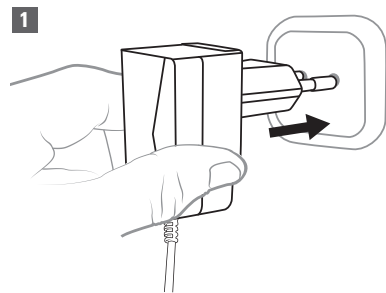



TÄGLICHER GEBRAUCH

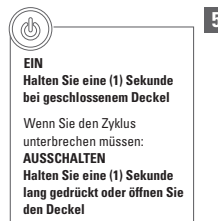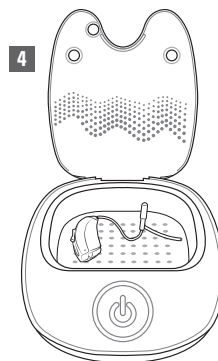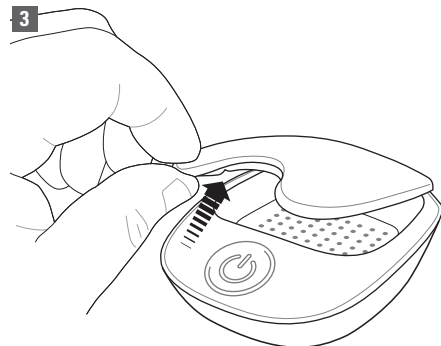

EIN
Halten Sie eine (1) Sekunde
bei geschlossenem Deckel

Wenn Sie den Zyklus
unterbrechen müssen:
AUSSCHALTEN
Halten Sie eine (1) Sekunde
lang gedrückt oder öffnen Sie
den Deckel

5

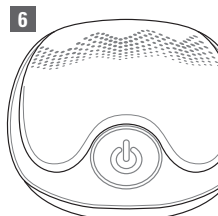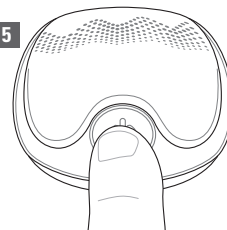

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung elektrischer Produkte, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich:

GEFAHR—Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Nicht beim Baden verwenden.
- Stellen Sie das Produkt nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder in diese fallen lassen
- Greifen Sie nicht nach diesem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

WARNUNG—Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- Überwachen Sie die Verwendung durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Invaliden genau.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck.
- Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie es zur Prüfung und Reparatur an die Verkaufsstelle oder das Servicecenter zurück.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett. Halten Sie alle Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.
- Nicht im Freien verwenden oder dort betreiben, wo Aerosolprodukte (Spray) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Das mit Ihrem Gerät gelieferte Netzteil wurde speziell für dieses Produkt hergestellt. Verwenden Sie es nicht mit einem anderen Gerät und verwenden Sie stattdessen keinen Adapter eines anderen elektrischen Geräts.

HINWEIS: Dieses Produkt dient nicht zur Diagnose, Vorbeugung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Bei einer Umgebungstemperatur von 21°C (70°F) beträgt die Betriebstemperatur dieses Geräts 42-45°C (107-113°F).

Die UV-Lampe schaltet sich aus, wenn der Deckel während des Desinfektionszyklus geöffnet wird. Die Lampe schaltet sich auch am Ende der 5-minütigen Zykluszeit aus.

Wenn der UV-Trockner längere Zeit nicht benutzt wird, leuchtet die Lampe möglicherweise nicht sofort. Starten Sie das Gerät einfach neu.

GARANTIESERVICE (AUSSERHALB NORDAMERIKAS)

Wenden Sie sich an den Geschäftssitz, an dem Sie Ihre Trocknungseinheit erhalten haben.


DryKlean.UV.

+31407602111 | info@dryandstore.com

©ETC DRYKLN UV (GER) QSG 1120 Rev A

DryKlean.UV[®]

UV-Konvektionstrockner

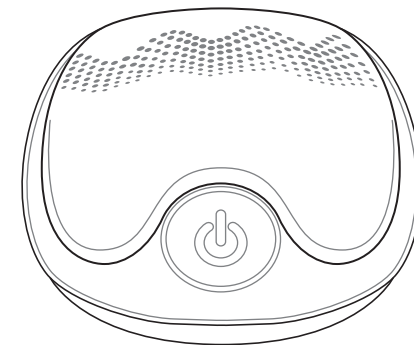

Schnellstartanleitung



EAR TECHNOLOGY CORPORATION
Helping people hear better, every day.™